

Seringue BD® à raccord NRFit™ Lok



Directives d'utilisation/Utilisation prévue :

Les seringues BD® à raccord NRFit™ Lok et les seringues BD® à raccord NRFit™ Slip sont destinées à une utilisation neuraxiale par les professionnels de la santé pour l'aspiration/injection de liquides.

Description du produit

Les seringues BD® à raccord NRFit™ Lok et les seringues BD® à raccord NRFit™ Slip sont des seringues stériles à usage unique dotées de raccords Lock ou Slip conformes à la norme ISO 80369-6 (NRFit™). La tige du piston de la seringue est jaune pour désigner un dispositif destiné à être raccordé uniquement à des dispositifs conformes à la norme ISO 80369-6, tels que les aiguilles spinales ou épidurales. Ces seringues sont stériles, non toxiques et apyrogènes. Ces produits sont exempts de latex de caoutchouc naturel, de BHT ou de DEHP.

Directives générales

- Une technique aseptique et une bonne préparation sont essentielles.
- Veuillez observer les précautions universelles avec TOUS les patients.
- Un capuchon de seringue conforme à la norme ISO 80369-6 qui peut être utilisé pour éviter les fuites de fluides ou de médicaments de la seringue.

Mises en garde

- Destiné à être utilisé pour un seul patient. La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies / préjudices.
- Toujours inspecter l'emballage avant de l'ouvrir.
- Observer scrupuleusement la seringue durant les procédures.
- Déposer les seringues en accord avec les directives générales nationales / internationales.
- Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés dans les plus brefs délais.
- Ne pas restériliser.

BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2019 BD. All rights reserved.

NRFit is a trademark of GEDSA used with permission.

1000030394302 500040038 Rev. 2019-06



Indique une connexion verrouillée



Becton Dickinson and Company
1 Becton drive
Franklin Lakes, NJ 07417 USA



Becton Dickinson Distribution Center
Laagstraat 57
B-9140, Temse - BE



Date de rédaction interne 27/02/2024