

**SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM STERILE A 0,9 %, EN RECIPIENT UNIDOSE****INDICATIONS:**

- Hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain.
- Hygiène nasale: en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.
- Hygiène auriculaire: entraîne les dépôts solubilisés de cérumen et rince le conduit auditif externe après une utilisation d'une solution tensio-active auriculaire.
- Lavage des plaies.
- Pour inhalation en aérosolthérapie : Cette indication n'est pas revendiquée pour le sérum physiologique dont l'unidose est en polyéthylène biosourcé.

**POSOLOGIE :**

- Hygiène nasale et oculaire :

Format 5 ml : peut être utilisée quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavages par jour, en fonction des besoins.

Format 10 ml : peut être utilisée quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 3 lavages par jour, en fonction des besoins.

- Hygiène auriculaire : la fréquence n'est pas définie, mais elle n'est généralement pas supérieure à une fois par jour.
- Lavage des plaies : la fréquence n'est pas définie, mais peut être de plusieurs fois par jour.
- Inhalation en aérosolthérapie : Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, reportez-vous aux instructions indiquées sur le produit à inhaler. Si le produit est utilisé seul, reportez-vous aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.

**MODE D'EMPLOI**

Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

- **Pour l'hygiène du nez**

Incliner la tête sur le côté. Introduire délicatement l'embout dans la narine supérieure et appuyer légèrement sur l'unidose. Répéter l'opération pour l'autre narine. Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent. Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

- **Pour l'hygiène des yeux**

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque oeil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'oeil. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse stérile.

- **Pour l'hygiène des oreilles**

Rincer le conduit auditif externe avec la solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Utiliser 1 dose pour les 2 oreilles. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

- **Pour le lavage des plaies**

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

- **Pour l'inhalation en aérosolthérapie**

Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, reportez-vous aux instructions indiquées sur le produit à inhaler. Si le produit est utilisé seul, reportez-vous aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.

**Précautions d'emploi**

- Pour l'hygiène du nez

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

- Pour l'hygiène des yeux

En cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

- Pour l'hygiène des oreilles (Mise en garde)

L'utilisation auriculaire de ce dispositif médical en cas de tympons perforés, d'antécédents de chirurgie de l'oreille ou d'affections chroniques de l'oreille est déconseillée ou doit faire l'objet d'un conseil préalable de votre médecin ou de votre pharmacien.

- Pour le lavage des plaies

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

- Pour l'inhalation en aérosolthérapie

Demander conseil à votre médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves respiratoires ou cardiovasculaires.

**MANIFESTATIONS INDESIRABLES**

Non attendues

**CONTRE-INDICATIONS**

- Pour l'hygiène des oreilles

L'utilisation auriculaire de ce dispositif médical en cas de tympons perforés, d'antécédents de chirurgie de l'oreille ou d'affections chroniques de l'oreille est déconseillée ou doit faire l'objet d'un conseil préalable de votre médecin ou de votre pharmacien.

- Pour l'inhalation en aérosolthérapie

Demander conseil à votre médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves respiratoires ou cardiovasculaires.

**MISE EN GARDE**

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations.

USAGE EXTERNE. NE PAS INJECTER. NE PAS AVALER. USAGE UNIQUE.

Ne pas utiliser une unidose endommagée (fuite du liquide, déformation...) ou une unidose déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : [www.labo-gilbert.fr](http://www.labo-gilbert.fr) et/ou à l'Autorité Compétente nationale. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**CONDITIONS DE CONSERVATION**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose. [Si zone III et IVa :] Conserver à une température inférieure à 30°C.

GB\_DM\_FT\_002 Version 7 of October 2023