


Aiguille de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™

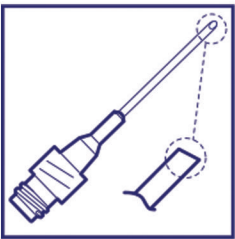

et Aiguille à filtre émoussée BD® NRFit™



CES DISPOSITIFS NE SONT PAS DESTINES AUX INJECTIONS CUTANEEES

Directives d'utilisation/Utilisation prévue :

- Les aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ servent à l'aspiration des fluides contenus dans des fioles et des ampoules.
- Les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ servent à l'aspiration et la filtration des fluides contenus dans des des fioles et des ampoules.
- Les aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ et les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ ne sont pas destinées aux injections cutanées.

Description du produit

- Les aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ et les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ se composent d’une aiguille creuse dotée d’une pointe d’aiguille émoussée, d’un protège-aiguille et d’une embase d’aiguille conforme à la norme ISO 80369-6 (NRFit™). Les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ comportent également un filtre de 5 microns.
- L’embase de l’aiguille a une partie de couleur jaune indiquant que le dispositif est conçu pour être raccordé à des dispositifs compatibles conformes à la norme ISO 80369-6 (NRFit™), tels que des seringues.
- L’embase de l’aiguille à filtre émoussée BD® NRFit™ est également dotée d’une partie translucide de couleur violette/rose indiquant que le dispositif contient un filtre, tandis que l’aiguille de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ comporte une partie rouge opaque.
- Le protège-aiguille est de couleur rouge pour indiquer que ce dispositif n’est PAS destiné aux injections cutanées.
- Les aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ et les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ sont stériles, non toxiques et apyrogènes. Ces produits sont exempts de latex de caoutchouc naturel, de BHT ou de DEHP.

Recommandations générales

- Les aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™ et les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™ doivent être connectées à des seringues à verrou NRFit™ ou à des seringues à glissement NRFit™. Tourner jusqu’à ce que l’ensemble soit solidement fixé pour la connexion à une seringue à verrou NRFit™. Pour la connexion à une seringue à glissement NRFit™, pousser fermement.
- Pour aspirer du liquide contenu dans des flacons, perforer l’obturateur à l’aide des aiguilles de remplissage à pointe émoussée BD® NRFit™. Pour aspirer du liquide contenu dans des ampoules en verre, utiliser les aiguilles à filtre émoussées BD® NRFit™.
- L’aiguille BD® de remplissage à filtrage émoussée NRFit™ contient un filtre unidirectionnel. Une fois que le liquide est filtré dans la seringue, retirer l’aiguille à filtre émoussée BD® NRFit™.
- Prélever le médicament conformément au protocole de l’établissement.

Avertissements

- Respecter les précautions universelles avec TOUS les patients.
- Tourner ou enfoncer l'aiguille jusqu’à ce qu’elle soit fermement installée pour éviter les fuites accidentelles et l’exposition au médicament.
- Destiné uniquement à un usage sur un seul patient. La réutilisation peut provoquer des infections ou d’autres maladies/blessures.
- Une technique aseptique et une préparation adaptée sont indispensables.
- Toujours inspecter l’emballage avant de l’ouvrir.
- Vérifier l’intégrité de l’emballage individuel. Ne pas utiliser si l’emballage ou le contenu est endommagé.
- Jeter les aiguilles conformément aux directives nationales/institutionnelles.
- SIGNALER IMMÉDIATEMENT LES BÂTONNETS D’AIGUILLE ET SUIVRE LE PROTOCOLE ÉTABLI. - Une ponction percutanée avec une aiguille contaminée peut entraîner des maladies graves telles que l’hépatite, le VIH (sida) ou d’autres maladies infectieuses.
- Le regainage des aiguilles est dangereux.

Mises en garde

- Tirer la protection de l’aiguille tout droit hors de l’aiguille.
- Comme pour toute procédure, pour éviter la rupture de l’aiguille, NE PAS TENTER DE REDRESSER UNE AIGUILLE PLIÉE.
- Ne pas restériliser.
- Sur prescription uniquement : MISE EN GARDE : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2025 BD. All rights reserved. NRFit is a trademark of GEDSA used with permission.

1000033900903 500085642 Rev.2025-12