

MIRAGE Smartsafe Aiguille microperfuseur de sécuritéSafety

- Retirer le produit de l’emballage. En cas d’emballage cassé ou détérioré, ne pas utiliser le dispositif.
- Tourner et retirer le capuchon de l’aiguille sans endommager l’extrémité de la canule et faire attention à l’extrémité exposée de la canule (Fig. 1)
- Tenir les ailettes papillon et laisser le côté lisse de la coque de protection face à la peau du patient, puis introduire l’aiguille dans le vaisseau sanguin du patient. (Fig. 2)
- Effectuer l’injection veineuse en suivant les procédures et les temps d’application indiqués sur le protocole au point indiqué.
- Une fois l’injection veineuse terminée, aplatir les ailettes sur la peau du patient et appliquer une pression sur la zone d’injection en suivant les indications et les procédures au point indiqué.

Comment activer la sécurité : Deux procédures pour activer la sécurité sont reportées ci-dessous. Noter que les lignes directrices internationales en matière de sécurité conseillent une activation aussi rapide que possible.

Activation durant l’extraction de l’aiguille de la veine : **A**

- Poser l’index sur l’avant de la protection en évitant d’exercer une pression trop forte, saisir la tubulure avec le pouce et le majeur (Fig. 3).
- Tirer la tubulure pour amener les ailettes à l’arrière de la protection (Fig. 4).
- On entendra un “clic” (Fig. 4 bis).
- Bloquer la tubulure dans le logement circulaire prévu à cet effet qui se trouve à l’arrière de la protection (Fig. 5).
- Éliminer immédiatement le dispositif dans les conteneurs appropriés (Fig. 6).

Activation après l'extraction de l'aiguille de la veine : **B**

- Tenez le tube pour extraire le dispositif de la veine (Fig. 7).
- En tenant la tubulure, pousser la protection vers l’avant pour amener les ailettes à l’arrière de la protection ; on entendra un “clic” (Fig. 8/8 bis).
- Bloquer la tubulure dans le logement circulaire prévu à cet effet qui se trouve à l’arrière de la protection (Fig. 9).
- Éliminer immédiatement le dispositif dans les conteneurs appropriés (Fig. 10).

Avertissements

- Le dispositif doit être utilisé uniquement par le personnel autorisé conformément aux procédures et dispositions en vigueur dans la structure où il est utilisé.
- Une piqûre percutanée avec une aiguille infectée peut transmettre des maladies graves telles que : le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ou d’autres maladies infectieuses. En cas de contact avec des échantillons biologiques, consulter immédiatement un médecin et suivre les procédures établies.
- Porter des gants lors de l’utilisation du dispositif.
- Observer et respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité, respectivement, valides et en vigueur sur le lieu d’utilisation lors de manipulation d’échantillons biologiques et du matériel pour le prélèvement sanguin.
- Dispositif jetable - réutilisation interdite: risque d’infections et de perte de fonctionnalité.
- Après l’activation de la sécurité, ne JAMAIS tenir ni toucher la protection.
- Immédiatement après utilisation, éliminer le dispositif protégé dans les conteneurs appropriés.
- Eliminer selon la réglementation locale en vigueur.
- Toujours tenir les mains derrière l’aiguille durant l’utilisation et durant son élimination.
- Se conformer aux réglementations en vigueur du pays d’utilisation.
- Conserver dans un endroit frais et sec, loin de toute substance chimique.
- Ne pas réintroduire l’aiguille si l’injection a échoué.

TECHNOLOGIE INDOLORE

76 044019 000 000_03_12_2023 REV 03-12/2023 & T013-0035-CEZB-1 REV.00-12/2021

Instructions d’utilisation AA14



Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd
No758, 5th Binhai Road, Binhai
Industrial Park, Longwan District, 325025
Wenzhou, Zhejiang Province - CN

Shangai International Holding Corp. GmbH
Eiffestraße 80
20537 Hamburg - DE

Date de rédaction interne 21/02/2024
Mise à jour Rev.1 : 05/09/2024