


Fixation de cathéter 3 en 1 PICC

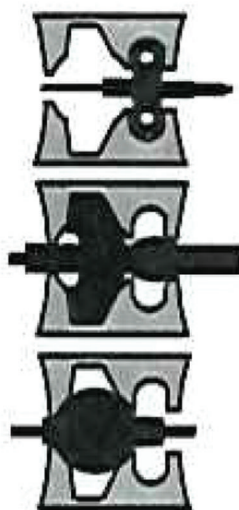

MODE D'EMPLOI :

1- Choisir la zone de mise en place du Grip-Lok.

Remarque : le cathéter doit avoir été inséré au préalable dans le patient.

2- Désinfecter la peau pour la pose du pansement selon le protocole standard de votre hôpital. Une préparation de la peau ou un rasage peuvent être nécessaires pour une meilleure adhérence chez certains patients.

3- Ouvrir le rabat supérieur, retirer le film intérieur et garder le rabat ouvert.

4- Faire glisser le Grip-Lok sous le cathéter et le faire coller dans la rainure adhésive prévue à cet effet.

5- Fixer le rabat supérieur au-dessus du cathéter.

6- Maintenir le Grip-Lok en position tout en retirant le papier protecteur d'un côté, puis de l'autre côté, afin de le coller sur la peau.

Remarque : remplacer le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide, ou s'il présente des signes d'usure ou des dommages.

Remarque : L'utilisation d'un tampon imbibé d'alcool peut éventuellement faciliter le retrait du dispositif de fixation de la peau.

Remarque : La réutilisation de ce dispositif peut modifier ses caractéristiques mécaniques ou biologiques et peut entraîner une défaillance du dispositif et exposer à des réactions allergiques ou à des infections bactériennes.

Pour élimination, placer les dispositifs contaminés dans des containers adaptés.


Grip-Lok is a trademark of TIDI product LLC

44U00003 Rev.1

 Vygon
5, rue Adeline
95440 ECOUEN - FR

 0459

STERILE R

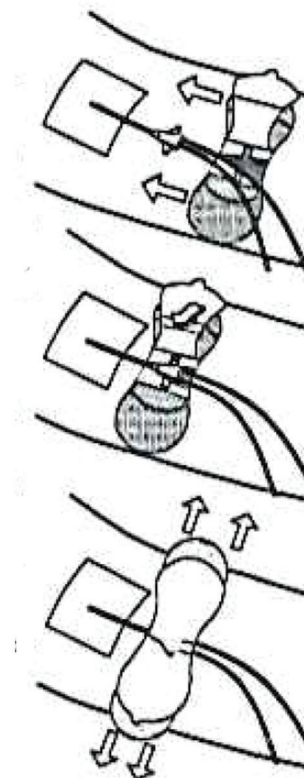

Date de rédaction interne 05/03/2024