

Pansements non tissé enveloppés 5x7cm ou 7x10cm:**Description :**

Bande adhésive protectrice compatible avec la peau saine sur laquelle est déposée une partie pouvant absorber les exsudats de petites plaies aiguës.

Mode d'emploi :

1. Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.
2. Pour une protection maximum, la peau non lésée doit être sèche.
3. Choisir le pansement de dimensions appropriées à la plaie et l'appliquer en lissant soigneusement les bords.
4. Surveiller et renouveler le pansement régulièrement.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur des plaies infectées de taille supérieure à la compresse et susceptibles de déborder de la compresse.

MO_PR1_002 - Version : 4.0 - Date d'application : 05/10/2020

 LABORATOIRES COLUXIA
Espace Industriel Les Mûriers
71160 DIGOIN - FR



Date de rédaction interne 21/02/2024