

Dispositif d'accès Luer CARESITE

Indications : Pour l'aspiration, l'injection ou l'écoulement par gravité/pompe de liquides intraveineux et de sang après insertion d'un raccord Luer mâle. Peut être utilisé avec des systèmes d'injection automatiques avec une pression maximum de 400 psi (2758 kPa) et un débit maximum de 15 ml/sec.

Mode d'emploi : Utiliser une méthode aseptique.

Pour accéder au dispositif d'accès Luer CARESITE : Amorcer le dispositif d'accès Luer avant utilisation. Fixer fermement le dispositif d'accès Luer au raccord voulu. Essuyer vigoureusement le dessus du dispositif d'accès Luer pendant 15 secondes avec de l'alcool isopropylique à 70 % et laisser sécher avant utilisation. Utiliser un raccord Luer sans aiguille. Rincer après chaque administration de médicament conformément aux directives de l'établissement, en fixant complètement le dispositif au raccord entre les rinçages. Pour une utilisation avec des systèmes d'injection automatiques : Fixer le dispositif d'accès Luer avec un raccord Luer Lock. Se référer aux étiquettes des dispositifs associés (p. ex., cathéters) pour connaître la pression et le débit maximum afin de s'assurer de la compatibilité. Remplacer le dispositif d'accès Luer conformément au protocole institutionnel.

AVERTISSEMENT

La réutilisation de dispositifs à usage unique présente un risque pour le patient ou l'utilisateur. Cela peut entraîner une contamination et/ou une altération de la fonctionnalité. La contamination et/ou l'altération de la fonctionnalité du dispositif peuvent provoquer des lésions, une pathologie ou le décès du patient.

Document No.: A4806091 - Version: 4.0 - 2.15.2019



BB. Braun Medical Inc.
Bethlehem,
PA 18018-3524 USA



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen - DE



0123



Date de rédaction interne 01/03/2024