

Anwendung :

Dieses Medizinprodukt ist für den Einmalgebrauch bei einem einzigen Patienten bestimmt.

Bezeichnung :

Diese Hinweise gelten für con HEMODIA hergestellte Behandlungssets. Artikelnummer und Bezeichnung des Produkts sind dessen Etikett zu entnehmen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen :

- Bei sterilen Komponenten wird die Sterilität des inhalts der ungeöffneten und unbeschädigten Verpackung garantiert. Das Medizinprodukt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert. Nicht resterilisieren. Weitere Kontraindikationen im Zusammenhang mit der Sterilität des Produkts sind dem Etikett des Produkts zu entnehmen.
- Vor der Anwendung Unversehrtheit des Verpackung prüfen..
- Medizinprodukt nicht verwenden, wenn die Verpackung vor der Anwendung beschädigt oder geöffnet wurde..
- Nicht wiederverwenden : Die Wiederverwendung des Medizinprodukts kann eine Infektion verursachen oder andere Schäden beim Patienten und Benutzer zur Folge haben.
- Verfalldatum auf der Verpackung oder dem Produktetiket prüfen. Nicht verwenden, wenn das Produkt abgelaufen ist.

Lagerungsbedingungen:

- An einem trockenen Ort aufbewahren.
- Hinweise zur Lagertemperatur sind der Produktennzeichnung zu entnehmen.

Vigilanz für Medizinprodukte :

- Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten, sind durch Hersteller oder zuständige Gesundheitsbehörde zu melden. Indem Sie schwerwiegende Vorkommnisse melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinprodukts zur Verfügung gestellt werden.

ACHTUNG : Ihr Set kan ein oder mehrere Teile enthalten, deren Vorsichtsmaßnahmen zu beachten sind. Lesen Sie die nachstehenden besonderen Anwendungshinweise, oder direkt in den Begleitdokumenten.

Bestandteile informationen :

WISCHTUCH: Für die Reinigung des Zubehörs oder die Handhygiene bestimmt.

WASCHHANDSCHUHE : Produkt für die Körperhygiene und den Komfort des Patienten.

MÜLLBEUTEL : Nicht für die Entsorgung von schneidenden, stechenden oder cerunreinigten Abfällen bestimmt.

SPRITZE : Die Spritzen des Sets bestehen aus polypropylen und können Polycarbonat, silikon, Isopren und Elastomer enthalten. Hinweise zum Gebrauch mit Medikamenten sind der Gebrouchsinformation des Arzneimittels zu entnehmen.

TABLETTS: Die Tablettts sind teile der Verpackung und nicht dafür bestimt, injizierbare Lösungen aufzunehmen.

BECHER : Die Becher bestehen aus polypropylen. Sie sind ausschließlich für antiseptische Flüssigkeit oder physiologische Kochsalzlösung bestimmt. Sie sind nicht für Implantate oder Injektionslösungen bestimmt. Dis Skalierung besitzt keine Messfunktion; sie stellt nur eine ungefähre Volumenangabe dar.

WASCHLOTION/SAVONGE: Die Waschlotion ist für die persönliche Hygiene der Patienten bestimmt. Anwendung bei Kinder unter zwei Jahren nicht empfohlen.

MASKEN : LDie Masken entsprechen der Norm EN 14683 aus dem Jahr 2019. Wenn nicht anders auf dem Etikett Ihres Produkts angegeben, sind sie vom Typ II(bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$). Waschen Sie Ihre Hände. Legen Sie die Schlaufen hinter die Ohren, die blaue Seite der Maske zeigt nach außen. Bedesken Sie Mund und nase. Dis Maske nicht herunter-bwz. hochziehen. Vermeiden Sie es, dis Maske zu berühren.



ASSEMBLE PAR :
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR

Veröffentlichungsdatum : 30/04/2024