

KOKOONPANOJA KOSKEVAT TIEDOT

KÄYTTÖ: Kertakäyttöinen kokoonpano yhdelle potilaalle.

Varoitukset ja varotoimet :

- Tarkista pakkauksen eheys ennen käyttöä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut/avattu.
- Älä steriloï uudelleen. • Älä käytä uudelleen: kokoonpanon uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektion tai muuta haittaa.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta tai tuotteen etiketistä. Älä käytä, jos tuote on vanhentunut.
- Pakettisi saattaa sisältää yhden tai useamman tuotteen, jonka käyttö edellyttää varotoimenpiteitä, jotka on mainittu tuotteella tai sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

SÄILYTYSOLOSUHTEET : katso tuotteen etiketti.

Materiaalivalvonta :

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle tai toimivaltaiselle terveysviranomaiselle. Ilmoittamalla vakavista vaaratilanteista autat saamaan lisää tietoa laitteen turvallisuudesta.

Katso kääntöpuolella olevat erityiset käyttöohjeet.

Laatimispäivä: 3. huhtikuuta 2024

Päivitys Rev.1 : 30. huhtikuuta 2024

Sivu 1/2



KOKOONPANIIJA :
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR

TIEDOTE AA21_FI

- **PYYHE** : Suunniteltu laitteiden puhdistukseen tai käsihygieniaan.
- **PESUKÄSINE** : Henkilökohtaista hygieniaa ja potilaan mukavuutta varten suunniteltu tuote.
- **JÄTEPUSSI** : Jätteille, jotka eivät ole teräviä, pistäviä tai likaisia.
- **RUISKU** : Sarjan ruiskut on valmistettu polypropeenista, ja ne voivat sisältää polykarbonaattia, silikonia, isopreeniä ja elastomeeria. Lääkkeiden käyttöä varten on katsottava aineen käyttöohjeet.
- **TARJOTTIMET** : Tarjottimet ovat pakkauskomponentteja, joita ei ole tarkoitettu sisältämään injektionesteisiin käytettäviä liuoksia.
- **MALJAT** : Maljat on valmistettu polypropeenista. Ne on tarkoitettu sisältämään ainoastaan antiseptistä nestettä tai fysiologista suolaliuosta. Niitä ei ole tarkoitettu sisältämään implantoitavia laitteita tai injektoitavia valmisteita. Mittausasteikoilla ei ole mittaustehtävää, ilmaisevat vain tilavuuden..
- **SAIPPUTYYNY** : Saippuatyyny on tarkoitettu potilaiden henkilökohtaiseen hygieniaan. Ei suositella alle kaksivuotiaille lapsille.
- **NAAMARIT** : Naamarit täyttävät normin EN 14683 vuodelta 2019. Ellei tuotteen merkinnöissä toisin mainita, ne ovat tyyppin II tuotteita (bakteerien suodatushehokkuus $\geq 98\%$). Pese kädet. Vie kiinnittimet korvien taakse, sininen puoli ulospäin Peitä nenä ja suu. Älä laske tai nosta naamaria. Vältä kosketusta.

Laatimispäivä: 3. huhtikuuta 2024

Päivitys Rev.1 : 30. huhtikuuta 2024

Sivu 2/2