

Uso :

Questo dispositivo é monouso ed é destinato a un singolo paziente

Descrizione

Queste istruzioni si applicano ai set terapeutici prodotti da HEMODIA. Per il numero e la designazione del dispositivo, consultare l'etichetta del prodotto.

Avvertenze e precauzioni per l'uso :

- Nel caso di articoli sterili, il contenuto non aperto e non danneggiato della confezione é garantito come sterile. Il dispositivo é sterilizzato con ossido di etilene. Non sterilizzare nuovamente. Per qualsiasi altra controindicazione relativa allo stato di sterilit  del dispositivo, consultare l'etichetta del prodotto.
- Verificare l'integrit  della confezione prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se la confezione é stata danneggiata o aperta prima dell'uso.
- Non riutilizzare : Il riutilizzo del dispositivo pu  causare infezioni o altre lesioni al paziente e l'utente.
- Controllare la data di scadenza sulla confezione o sull'etichetta del prodotto. Non utilizzare se il prodotto. Non utilizzare se il prodotto é scaduto.

Condizioni di conservazione :

- Conservare in luogo asciutto.
- Per le temperature di conservazione, fare riferimento all'etichetta del prodotto.

Materiovigilanza :

- Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo devono essere notificati al produttore o all'autorit  sanitaria competente. Segnalando incidenti gravi, l'utilizzatore contribuisce alla fornitura di ulteriori informazioni sulla sicurezza del dispositivo.

ATTENZIONE : il set pu  contenere uno o pi  articoli per i quali   necessario adottare precauzioni per l'uso. Consultare le indicazioni speciali per l'uso di seguito o scritte direttamente nei rispettivi documenti allegati.

Composants informazioni:

PANNO : Per la pulizia del materiale o l'igiene delle mani

QUANTO DA BAGNO : Prodotto destinato all'igiene personale e al comfort del paziente.

BORSA RIFIUTI : Per rifiuti non affilati, taglienti o sporchi.

SIRINGA : Le siringhe nel set sono realizzate in polipropilene e possono contenere policarbonato, silicone isoprene ed elastomero. Per qualsiasi uso con sostanze medicinali, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegata alla sostanza.

VASSOI : I vassoi sono elementi per l'imballaggio che non sono destinati a contenere soluzioni iniettabili.

COPETTE : Le coppette sono realizzate in polipropilene. Sono destinate a contenere solo liquido antisettico o soluzione fisiologica. Non sono destinate a contenere dispositivi da impiantare o preparati iniettabili. La scala non ha una funzione di misurazione, ma fornisce solo un'indicazione di volume.

SAPONE/SAVONGE : Il sapone   destinato all'igiene personale dei pazienti. Uso non raccomandato nei bambini di et  inferiore ai due anni.

MASCHERINE : La mascherina sono conformi alla norma EN 14683:2019. Salvo indicazione contraria sull'etichetta del prodotto, sono del tipo II (efficienza della filtrazione batterica $\geq 98\%$). Lavarsi le mani. Passare gli elastici dietro le orecchie. Il lato blu all'esterno. Coprire il naso e la bocca. Non abbassare n  rialzare la mascherina. Evitare di toccarla



ASSEMBLE PAR :
Hemodia SAS
85 rue du Ch ne vert
31670 LABEGE - FR