

INFORMATIE OVER MONTAGES

GEBRUIK: Montage voor eenmalig gebruik, uitsluitend bedoeld voor één patiënt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Controleer vóór gebruik de integriteit van de verpakking, gebruik deze niet als de verpakking beschadigd/geopend is.
- Niet opnieuw steriliseren.
- Niet opnieuw gebruiken: Hergebruik van het geheel kan infecties of andere schade veroorzaken.
- Controleer de vervaldatum op de productverpakking of het etiket. Niet gebruiken als het product verlopen is.
- Uw set kan een of meer elementen bevatten die voorzorgsmaatregelen vereisen bij gebruik, zoals vermeld op het product of in een begeleidend document.

OPSLAGCONDITIES: zie het productlabel.

Materiovigilantie: Elk ernstig incident dat zich in verband met het apparaat voordoet, moet aan de fabrikant of aan de bevoegde gezondheidsautoriteit worden gemeld. Door ernstige incidenten te melden, draagt u bij aan het verschaffen van meer informatie over de veiligheid van het apparaat.

Raadpleeg de speciale gebruiksaanwijzing op de achterkant.

Aanmaakdatum: 03 APRIL 2024

Update Rev.1: 30 APRIL 2024

Pagina 1/2



GEMONTEERD DOOR:
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR

INFORMATIE AA21_NL

- **REINIGINGSVIERTANTJE :** Bedoeld voor het reinigen van apparatuur of handhygiëne.
- **WASHANDJE :** Product bedoeld voor persoonlijke hygiëne en patiëntcomfort.
- **AFVALZAK :** Bestemd voor niet-snijdend, stekelig of vuil afval.
- **SPUIT :** De spuiten in de set zijn gemaakt van polypropyleen en kunnen polycarbonaat, siliconen, isopreen en elastomeer bevatten. Raadpleeg voor elk gebruik met medicinale stoffen de bijsluiters van de stof.
- **DIENBLADEN :** De dienbladen zijn verpakkingselementen die niet bedoeld zijn om injecteerbare oplossingen te bevatten.
- **BEKERS :** De bekercs zijn gemaakt van polypropyleen. Ze zijn bedoeld om alleen een antiseptische vloeistof of fysiologische zoutoplossing te bevatten. Ze zijn niet bedoeld om implanteerbare hulpmiddelen te bevatten of injecteerbare preparaten. De graduaties hebben geen meetfunctie; ze geven alleen een indicatie van het volume.
- **ZEEP :** De zeep is bedoeld voor de persoonlijke hygiëne van patiënten. Niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan twee jaar.
- **MASKER :** De maskers voldoen aan de EN 14683 norm van 2019. Tenzij anders vermeld op de etikettering van uw product, zijn ze Type II (bacteriële filtratie-efficiëntie $\geq 98\%$). Was je handen. Geef de bevestigingsmiddelen door achter de oren, blauwe kant aan de buitenkant. Bedek de neus en mond. Laat het masker niet zakken of omhoog gaan. Vermijd het aanraken.

Aanmaakdatum: 03 APRIL 2024

Update Rev.1: 30 APRIL 2024

Pagina 2/2