

Kuitukankaiset liimanauhat

KÄYTTÖ: Kertakäyttöinen kokoonpano yhdelle potilaalle.

1- Ennen kuin irrotat kaistaleen suojasta, revi sen leikkaus levyn molemmista päistä ja vasemmalta ja oikeilta puolelta.

2- Nosta suojan toista puolta ja irrota liuska varovasti suorassa linjassa.

3- Poista suojan reunat ja kiinnitä liuska loppuun.

4- Kohdista painetta tasaisesti nauhan päälle, jotta hyvä tarttuminen ihoon voidaan varmistaa. 5- Irrota liuska(t) dialyysijakson päätyttyä hitaasti iholta.

KÄYTTÖVAROITUKSIA:

- Tarkista pakkauksen eheys ennen käyttöä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut/avattu.
- Älä steriloï uudelleen.
- Älä käytä uudelleen: kokoonpanon uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektion tai muuta haittaa.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta tai tuotteen etiketistä. Älä käytä, jos tuote on vanhentunut.
- Ei käytettäväksi sondin kiinnittämiseksi tai pitelemiseksi hematologiassa, tehohoidossa tai inkubaattoreissa.
- Älä irrota liuskaa nopeasti suojuksesta ilman suoraa liikettä, sillä tämä voi vahingoittaa liuskaa, se voisi aiheuttaa ”korkkiruuvä”-ilmiön eikä liuskaa voisi enää käyttää.
- Älä käytä ”korkkiruuviliuskoja” tai liuskoja, joiden liimapohja on paljastunut ja/tai joihin on koskettu.
- Poista kaikki paikallisesti iholla tuotteen (desinfointiaine, paikallispuudute, voide jne.) jäämät ja kuivaa steriilillä siteellä. Ole varovainen, rasvaisten tuotteiden (kuten voiteiden tai voiteiden) jäämät voivat heikentää tarttuvuutta.
- Älä käytä tai aseta uudelleen jo kiinnitettyä liuskaa.
- Älä jätä paikalleen dialyysisession jälkeen.

VARASTOINTIOLOSUHTTEET: Alkuperäispakkauksessa tuote säilyttää liimaominaisuutensa, jos sitä säilytetään huoneenlämmössä 15-30 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.

MATERIAALIVALVONTA:

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.



KOKOONPANIJA :
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR