

ANVÄNDNING: Engångsskit avsett för användning på en patient.

- 1- Innan du drar ut tejpen från skyddshöljet, öppna skåran i remsans ändar och på dess vänstra och högra sida.
- 2- Lyft ena sidan av skyddshöljet och dra försiktigt ut tejpremsan genom att dra fullkomligt rakt.
- 3- Dra av skyddshöljets kanter och anbringa tejpremsan på patienten.
- 4- Tryck jämnt över tejpen så att den fäster ordentligt på huden.
- 5- När dialysen är avslutad, avlägsna sakta tejpremsan/tejprensorna från huden.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING:

- Kontrollera att förpackningen är hel före användning, använd inte produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.
- Återsterilisera inte.
- Återanvänd inte: återanvändning av produkten kan ge upphov till infektion eller andra skador.
- Kontrollera sista förbrukningsdag på förpackningen eller produktetiketten. Använd inte produkten om sista förbrukningsdag passerats.
- Får ej användas för att fixera och fästa sond i samband med hematologisk vård, intensivvård och kuvösvård.
- När du snabbt drar av tejpen från skyddshöljet, dra alltid fullkomligt rakt. I annat fall kan tejpen "skruva" sig och bli oanvändbar.
- Använd inte tejpen om den har skruvat sig eller om dess självhäftande yta har exponerats eller vidrörts.
- Avlägsna eventuella rester av topikala produkter (desinfektionsmedel, lokalbedövande substanser, salvor, krämer) och torka med steril kompress. Observera att rester av feta produkter (som krämer och salvor) kan försämra fästförmågan.
- Återanvänd eller flytta aldrig en redan applicerad tejpremsa.
- Låt inte tejpen sitta kvar efter att dialysen har avslutats.

LAGRING: I ursprungsförpackningen behåller produkten sin fästförmåga om den förvaras i en temperatur av mellan 15°C och 30°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 35% och 65%.

INCIDENTRAPPORTERING FÖR MEDICINSK UTRUSTNING: Varje allvarlig incident med koppling till produkten skall rapporteras till tillverkaren eller behörig hälsomyndighet. Genom att rapportera allvarligare incidenter bidrar du med information som kan öka produktsäkerheten.



KITETS INNEHÅLL FÖRPACKAT AV:
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR