

Dispositif de fixation de cathéter StatLock™

Lire attentivement avant usage

Recommandations concernant la sécurité d’emploi et l’efficacité

⊗ Exclusivement à usage unique. ⊗ Ne pas restériliser.

Rx only. Attention ! La loi fédérale (E.U.) n’autorise la délivrance de ce système qu’à un médecin ou sur prescription d’un médecin

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène.⊗ Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. Le trajet de soluté (si présent) est apyrogène.

Pour toute information concernant les code du produit **REF** numéro de lot **LOT** et date de péremption , consulter l’étiquette sur l’emballage.

STERILE|EO Itérer le dispositif de fixation Statlock™ ni ses composants. La pose doit être réalisée par un personnel formé ayant connaissance des repères anatomiques, des techniques de sécurité et des composants possibles.

Non fabriqué en latex naturel

Mode d’emploi

StatLock™ est un dispositif de fixation destiné aux tubes et cathéters médicaux compatibles. Diverses conceptions de plaques StatLock™ et de bagues de retenue StatLock™ sont disponibles.

Choisir le dispositif de fixation StatLock™ indiqué pour la tubulure ou le cathéter à fixer.

Contre-indications

Allergies connues aux bandes ou rubans adhésifs.

Avertissements et précaution

- Ne pas utiliser le dispositif de fixation StatLock™ si une perte d’adhésion risque de survenir, notamment sur un patient en état confusionnel, un dispositif dont l’acès n’est pas surveillé ou une peau sudorifique ou non adhérente.
- Observer les précautions universelles se rapportant au sang et aux liquides organiques ainsi que les procédures de contrôle d’infection lors de l’application et du retrait du dispositif de fixation StatLock™.
- ON PEUT, LE CAS ÉCHÉANT OU SI NÉCESSAIRE, SUTURER UN TAMPON StatLock™ À LA PEAU.
- Eviter le contact du dispositif de fixation StatLock™ avec le l’alcool ou de l’acétone car ces substances peuvent affaiblir les liaisons des composants et l’adhésion du tampon StatLock™.
- Minimiser la manipualtion du cathéter/tubulure lors de l’application et du retrait du dispositif de fixation StatLock™
- On doit utiliser un connecteur Luer Lock de dispositif de fixation StatLock™ pour fixer des cathéters veineux centraux ou artériels.
- Toujours appliquer une bande adhésive aux cathéters veineux centraux ou artériels au niveau ou à proximité du site d’introduction lors de l’utilisation du dispositif de fixation StatLock™
- Éliminer tout huile et hydratant de la zone cutanée choisie.
- Inspecter régulièrement l’adhésion du tampon StatLock™ et la position du cathéter/tubulure.
- Orienter le dispositif de fixation StatLock™ de façon à ce que la flèche soit dirigée vers l’extrémité du cathéter.
- Remplacer le dispositif de fixation StatLock™ au moins tous les 7 jours.
- Ce dispositif est à usage unique. Une réutilisation et/ou un ré-emballage peut créer un risque d’infection pour le patient ou l’utilisateur, compromettre l’intégrité structurale et/ou le matériau essentiel et les caractéristiques de conception du dispositif, ce qui est susceptible de conduire à une défaillance du dispositif et/ou à l’atteinte, la maladie ou le décès du patient.
- Ne pas restériliser. La stérilité du dispositif à usage unique n’est pas garantie après restérilisation en raison d’un degré indéterminable de contamination pyrogène ou microbi-
enne potentielle pouvant conduire à des complications infectieuses. Une restérilisation peut compromettre l’intégrité structurale, le matériau essentiel et/ou les caractéris-
tiques de conception, et conduire à une perte imprévisible de fonctionnalité et/ou à une défaillance du dispositif.

Recourir à une technique stérile pour l’application et le retrait du dispositif de fixation StatLock™. Consulter les illustrations pour les détails spécifiques qui s’y rapportent.

Prolongaterur:

Si présent purger, rincer, et connecter conformément au mode d’emploi qui l’accompagne.

Application du dispositif de fixation StatLock™

- 1 -**PREPARER** : préparer la zone pour le dispositif de fixation Statlock™ avec de l’alcool pour dégraisser et assécher, et la préparation cutanée pour protéger la peau et améliorer l’adhérence. LAISSER COMPLETEMENT SECHER, LE CONTACT AVEC L’ALCOOL ETANT SUSCEPTIBLE D’AFFAIBLIR LA LIAISON DES COMPOSANTS ET L’ADHERENCE DU TAMPON. CONNECTER TOUJOURS LE DISPOSITIF DE FIXATION StatLock™ AU CATHETER AVANT DE FAIRE ADHERER LE TAMPON A LA PEAU.
- 2 - **APPUYER** : Avant d’appliquer le tampon du dispositif de fixation StatLock™ à la peau, fixer la tubulure ou le cathéter au dispositif de retenue StatLock™.
- 3- **PELER** : Peler le renfort en papier du dispositif de fixation StatLock™.
- 4- **METTRE EN PLACE** : Mettre en place le dispositif de fixation StatLock™ sur la zone cutanée, un côté à la fois.

Remarque:


- On peut coller le tampon du dispositif de fixation StatLock™ après confirmation sous radioscopie de la bonne position du cathéter/tubulure.
- Appliquer une bande adhésive aux cathéters veineux centraux ou artériels pour une sécurité d’emploi supplémentaire lors des changements de pansement du dispositif de fixation StatLock™

Retrait du dispositif de fixation StatLock™

Retirer avec précaution le pansement de protection par traction et enlèvement des sutures (si nécessaire)

- 1- **DEGAGER** le cathéter/tubulure du système de retenue du dispositif de fixation StatLock™.
- 2- **DISSOUDRE** l’adhésif du dispositif de fixation StatLock™ avec un tampon imbibé d’alcool tout en soulevant doucement le tampon StatLock™.
- 3- **DOCUMENTER** le changement de pansement du dispositif de fixation StatLock™ dans le dossier du patient.
- 4- **JETER** tout le matériel dans les contenants appropriés.

TECHNIQUE D’APPLICATION

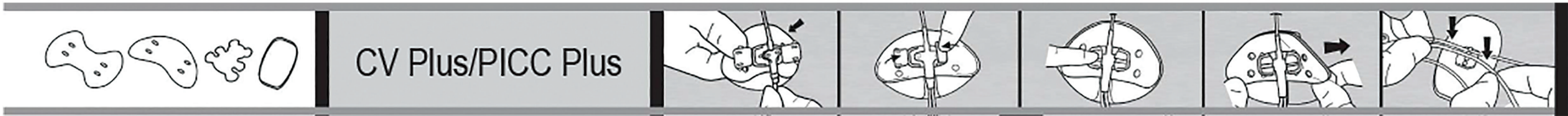

SECURISATION DU CATHETER

TECHNIQUE DE RETRAIT



Bard and StatLock are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

BAW2405848, 0