


ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER
Pansement hydrocellulaire adhésif avec gel siliconé

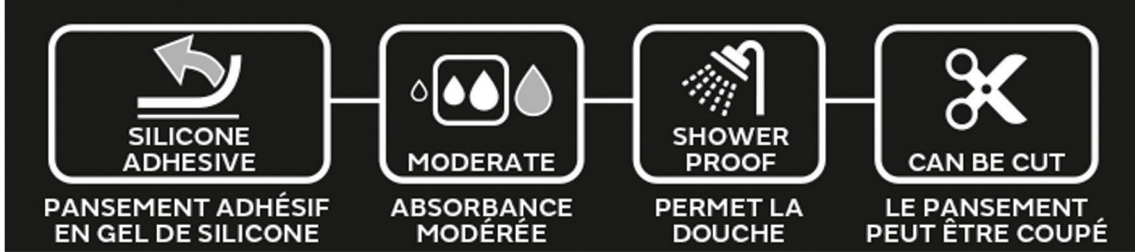

Description

Les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER ont une construction à trois couches qui combine un tampon hydrocellulaire absorbant disposé en sandwich entre la couche en contact avec la plaie d’un adhésif à base de gel siliconé perforé et un film supérieur imperméable hautement perméable.

Mode d’action

Les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER permettent une bonne gestion des fluides et favorisent un environnement humide propice à la cicatrisation des plaies, ce qui est optimal pour la guérison. Ils aident aussi à minimiser le risque de macération. La couche perforée de l’adhésif à base de gel siliconé en contact avec la plaie laisse passer l’exsudat vers la couche de mousse. La couche de l’adhésif à base de gel siliconé est douce et convient aux peaux fragiles. Elle facilite l’application, le repositionnement et le retrait du pansement. La couche de mousse hydrocellulaire absorbe l’exsudat et l’éloigne de la plaie. Le film supérieur respirant permet l’évaporation et aide à prévenir la contamination de la plaie par des liquides et des bactéries. Il est étanche.

Indications

- 1. Prise en charge des plaies superficielles, bourgeonnantes, exsudatives chroniques et aiguës ainsi que des plaies superficielles à profondes, y compris :
 - Escarres
 - Ulcères de jambe
 - Ulcères du pied diabétique
 - Plaies chirurgicales
 - Brûlures du premier et deuxième degré
 - Sites donneurs de greffe
 - Déchirures cutanées
 - Ulcères fongueux
- 2. Prévention des escarres sur une peau intacte, notamment des escarres causées par les dispositifs médicaux, dans le cadre du protocole de prévention des escarres.

Précaution : il convient d’user de prudence lors de l’utilisation du pansement sous des dispositifs médicaux placés à proximité du nez et de la bouche. À de tels endroits, l’humidité peut augmenter et impacter l’adhérence, entraînant des mouvements du pansement.

Pour des informations complémentaires, visiter le site : www.allevyn.com

Précautions d’emploi

- Des précautions doivent être prises lorsque le pansement est utilisé sous des dispositifs médicaux à proximité du nez et de la bouche, où de l’humidité peut s’accumuler et affecter l’adhérence, entraînant un déplacement du pansement.
- L’utilisation des pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER, dans le cadre d’un programme de prophylaxie contre le développement d’une escarre due à la pression, n’exclut pas la nécessité de continuer à développer et à suivre un protocole complet de prévention des escarres dues à la pression (p. ex., repositionnement régulier, surfaces de soutien appropriées, soins de la peau et évaluations cutanées fréquentes).
- Comme l’adhésif utilisé est doux, ne pas utiliser ce pansement pour fixer d’autres dispositifs médicaux sur le patient.
- En présence de rougeurs ou de sensibilité, arrêter l’utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Si vous coupez le pansement, vous compromettez la barrière bactérienne et les propriétés d’étanchéité du pansement.
- Ne pas immerger le pansement dans l’eau.
- Ne pas utiliser ce pansement avec des agents oxydants comme les solutions d’hypochlorite (p. ex., EUSOL) ou du peroxyde d’hydrogène, car ces produits peuvent réduire le pouvoir absorbant du pansement.
- À usage unique et ne doit pas être réutilisé car une contamination croisée ou une infection pourrait se produire et le pansement pourrait être inefficace.
- Une fois ouverts, ne conservez pas les pansements non utilisés pour une application ultérieure.
- En cas de plaies infectées, traiter cette infection conformément au protocole clinique local.

Les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER sont destinés aux professionnels de la santé ou aux patients sous la direction d’un professionnel de la santé. Lorsque cela est nécessaire, les professionnels de la santé doivent fournir des conseils appropriés aux patients sur la façon d'appliquer, de surveiller le pansement, de le retirer et de le jeter, et sur le moment où il faut contacter un professionnel de la santé, comme indiqué dans cette notice.

Instructions d’utilisation

- 1. Nettoyez le site d’application. Assurez-vous que la peau autour de la plaie est propre, sèche et exempte de pilosité excédentaire.
- 2. Choisissez une taille de pansement appropriée. Assurez-vous que la compresse absorbante recouvre l’ensemble de la plaie ou de la région à protéger. L’échelle sur la pochette est uniquement à titre indicatif. Éviter tout contact entre la poche et la plaie.
- 3. Retirez la première partie du papier protecteur et appliquez le côté adhésif du pansement sur la peau. Lors de l’application du pansement adapté au sacrum, placez l’extrémité étroite du pansement au minimum à 2 cm au-dessus du sphincter anal, puis lissez le pansement sur le sacrum.
- 4. Enlevez le reste du papier protecteur. Lissez le pansement. Lors de l’utilisation du pansement sur une plaie, assurez-vous que la compresse absorbante recouvre la plaie.
- 5. Lissez les bords du pansement. Assurez-vous de l’absence de plis susceptibles de compromettre l’étanchéité. Le pansement peut être repositionné si besoin.
- 6. Les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER peuvent être coupés spécialement pour panser les plaies sur le talon, le coude et autres zones problématiques. Observer toujours les règles d’hygiène lorsque vous coupez le pansement. Si vous coupez le pansement, vous compromettez la barrière bactérienne et les propriétés d’étanchéité du pansement. Veillez à ce que toutes les zones de mousse exposées soient recouvertes d’un pansement pelliculaire approprié en prenant soin de ne pas recouvrir tout le pansement. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur l’application des pansements pour talons et sacrum, reportez-vous aux schémas présents sur la pochette ou la boîte du pansement. Pour les plaies nécrotiques ou visqueuses, les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER peuvent être utilisés conjointement avec les pansements IN-TRASITE ⚡ GEL Hydrogel.

Observation pour une utilisation dans le cadre de la prévention des escarres : inspectez fréquemment la peau à la recherche de lésions causées par la pression en soulevant l’un des coins du pansement. Repositionnez le pansement après l’inspection.

Retrait : soulevez l’un des coins et décollez lentement le pansement jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré.

Éliminer les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER conformément aux protocoles cliniques locaux ou éliminer dans le respect des règles d’hygiène après utilisation.

Fréquence de changement

Durant les premières phases de traitement, les pansements ALLEVYN ⚡ GENTLE BORDER devront être fréquemment inspectés. Les pansements ALLEVYN GENTLE BORDER peuvent être laissés en place jusqu’à 7 jours, sauf dans la zone sacrée où les pansements peuvent être laissés en place jusqu’à 5 jours. Les pansements ALLEVYN GENTLE BORDER doivent être changés en fonction de l’état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou jusqu’à ce que l’exsudat soit visible et qu’il soit à moins de 0,5 cm/3/16 po du bord de la compresse, selon la première éventualité. La décision de changer de pansement doit dépendre de l’évaluation clinique et des protocoles locaux, sous la direction d’un professionnel de la santé.

Si un incident grave semble survenir lors de l’utilisation du dispositif, il faut le signaler au fabricant et à l’autorité compétente.

Complaints@Smith-Nephew.com

⚡ Marques de commerce de Smith & Nephew. Date de publication 04/2024. Révision 02

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains. www.smith-nephew.com/patents

134253RevA 42560 Date of issue 04/2024. Revision 02