



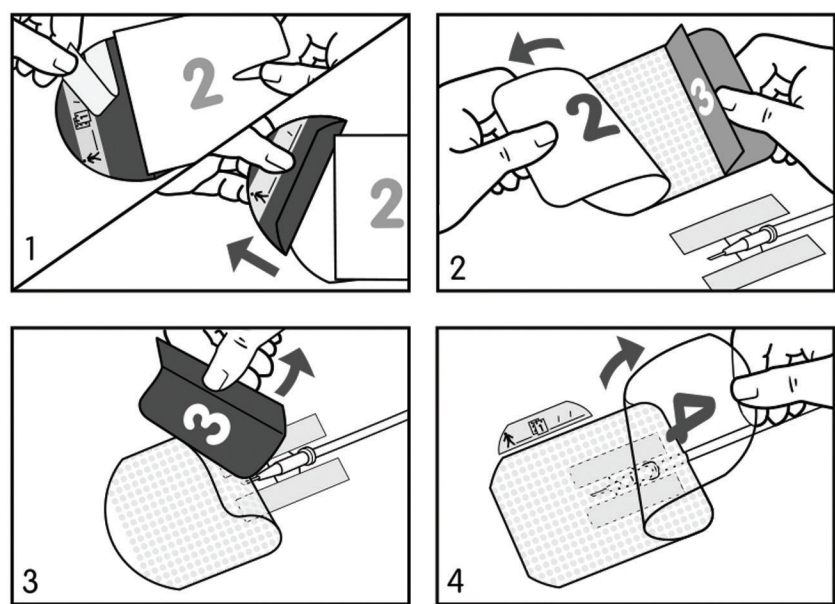

Disponibilité du produit				
Code	Taille	Indication	Disponibilité	Avec orifice
4007	6 cm x 7 cm	Cathéters périphériques	Carton de 100	Non
4008	10 cm x 12 cm	Cathéters centraux	Carton de 50	Non
66004005	10 cm x 12 cm	Cathéters centraux	Carton de 10	Non

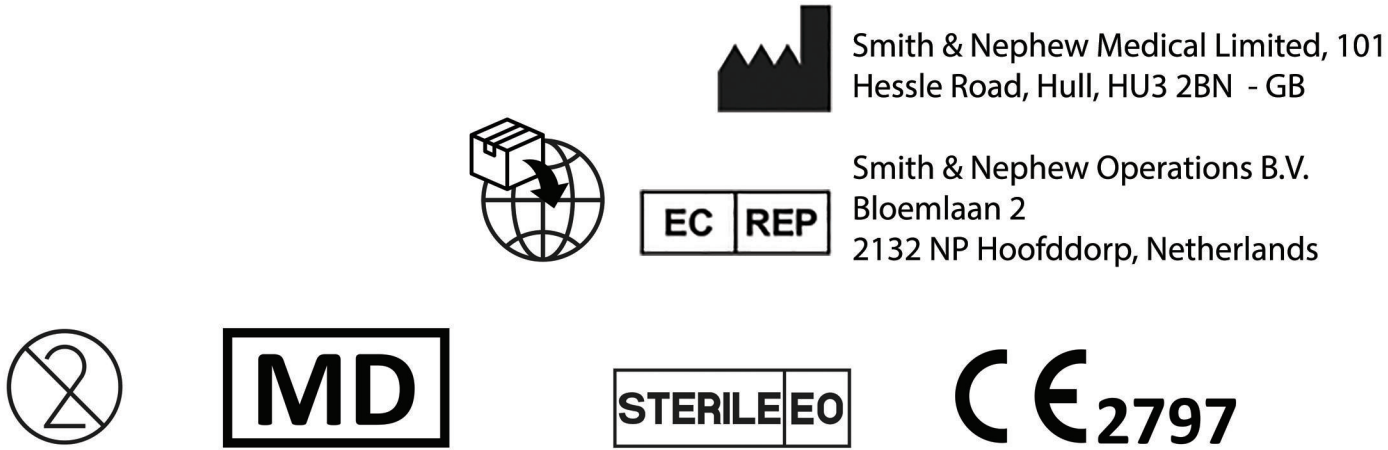

Description : Les pansements IV3000 ✕ sont des pansements film transparents sensibles à l’humidité spécifiquement conçu pour répondre aux besoins en matière de fixation de cathéter et de protection des sites IV.

Mode d’action : Les pansements IV3000 se composent d’un film REACTIC ✕ exclusif qui laisse respirer la peau et se caractérise par une haute perméabilité à la vapeur d’eau (MVTR). Ce film est imperméable à l’eau et constitue une barrière aux bactéries et aux virus et, tant qu’il est intact, il protège le site IV contre toute contamination extérieure. Ces propriétés permettent au site d’insertion du cathéter d’être plus sec, évitent la macération et diminuent la colonisation de la peau, réduisant ainsi le risque d’infection lié au cathétérisme. De plus, il peut être appliqué facilement et de manière aseptique, et réduit la sensation de douleur au retrait. Les pansements IV3000 sont recouverts d’un adhésif non irritant et non sensibilisant. Des bandes de fixation stériles pour usage médical et une étiquette de documentation sont aussi fournies avec les pansements.

Indications : Convient pour la fixation de cathéters sans orifice.

Mode d’emploi : Nettoyer et sécher minutieusement la zone d’application conformément aux procédures normales.

1. Oter les bandes de fixation du support (1) et les appliquer en veillant à ne pas recouvrir le point de ponction. Les bandelettes peuvent être utilisées sur les ailettes ou la partie centrale du cathéter pour améliorer la fixation, ainsi que pour fixer la tubulure et stabiliser les lumières du cathéter. Ôter le film protecteur (1) du pansement. 2. Retirer le papier protecteur (2) dans le sens indiqué sur le schéma. Centrer le pansement sur le site d’insertion du cathéter. 3. Placer le pansement sur la raccord du cathéter, puis coller le pansement sur la peau du patient, en s’assurant qu’il y a un minimum de plis sur le produit. Enlever le papier protecteur restant (3). 4. Retirer le support transparent imprimé (4) en soulevant la languette non adhésive à l’extrémité du pansement et en tirant en diagonale jusqu’à ce que le support soit entièrement retiré. 5. Terminer l’application en lissant le film afin qu’il moule parfaitement de cathéter. 6. Conformément aux protocoles cliniques locaux, des informations peuvent être notées avec un stylo sur l’étiquette de documentation avant d’enlever le support (1) ; celle-ci peut être placée dans les notes du patient, sur la peau ou bien sur le pansement (sans dissimuler le site d’insertion du cathéter). 7. Si plusieurs pansements doivent être utilisés, éviter qu’ils ne se chevauchent.

Retrait : Le pansement peut rester en place jusqu’à 7 jours. Retirer le pansement en le détachant et en l’étirant parallèlement à la peau du patient tout en gardant la peau et le cathéter immobiles avec l’autre main. Éliminer conformément au protocole clinique local.

Contre-indications

Les bandes de fixation et l’étiquette de documentation ne sont pas indiquées pour remplacer les sutures ou d’autres méthodes de fermeture primaire des plaies.

Précautions d’emploi : Utiliser seulement sur peau sèche et préparée. Ne pas empiler ou superposer les pansements. Surveiller régulièrement le pansement et le cathéter pour vérifier leur fixation et contrôler le débit de perfusion, en particulier après un bain ou une douche, ou encore si le pansement et le site de cathétérisme paraissent humides. Si le pansement se détache, vérifier le positionnement du cathéter, puis poser un nouveau pansement. Comme pour tous les produits adhésifs, appliquer et retirer délicatement pour les peaux sensibles ou fragilisées. En présence de rougeurs ou de sensibilité, arrêter l’utilisation. Les pansements IV3000 sont des produits à usage unique et ne doivent pas être réutilisés. Une contamination croisée peut se produire et le traitement pourrait être inefficace. Les pansements sont destinés aux professionnels de santé uniquement. Si selon vous, lors de l’utilisation du dispositif, un incident grave est survenu, le signaler au fabricant et à l’autorité compétente.complaints@smith-nephew.com

18701920 10601664 37058 Date of issue 10/2022. Revision 01.