

Veillez lire attentivement cette notice ainsi que les autres notices et instructions incluses dans le nécessaire de soin car elles contiennent des informations importantes concernant l'utilisation de ce nécessaire de soin. Pour toute question contacter votre distributeur.

Utilisation prévue :

Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés pour l'entretien des sondes et le soin aux patients sous nutrition entérale à domicile.

Indications :

Patients adultes et pédiatriques avec sonde d'alimentation par gastrostomie ou jéjunostomie.

Recommandations d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité des emballages. Ne pas utiliser si le blister est ouvert ou endommagé.
- Ne pas réutiliser : la réutilisation de l'assemblage peut provoquer une infection ou d'autres préjudices.
- Ne pas restériliser.
- Réaliser le soin conformément à la prescription médicale, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et dans le respect des bonnes pratiques.
- Utiliser une compresse pour chaque manipulation.
- Se laver les mains avec un savon antiseptique (non fourni) ou se désinfecter les mains par friction avec une solution hydroalcoolique (non fournie) avant et après toute manipulation.
- Bien refermer la boîte du nécessaire de soin après chaque utilisation.
- Ne pas ouvrir la boîte de compresses avec un objet coupant.
- Paire de ciseaux : Limite d'oxyde d'éthylène par dispositif sur 24h - 5 DM : 4MG pour une masse corporelle patient de 70kg

Soin :

- Ouvrir de façon aseptique les blisters des dispositifs médicaux nécessaires pour le soin.
- Enfiler les gants en latex.
- Imbiber une compresse avec du sérum physiologique
- Nettoyer le pourtour de la stomie selon le protocole
- Sécher à l'aide des compresses.
- Vérifier le bon placement de la sonde selon les instructions du fabricant

- Si nécessaire mobiliser la sonde à ballonnet et le regonfler à l'aide de la seringue 20ml selon le volume et le protocole établi par le médecin et les instructions du fabricant.
- Refaire le pansement avec le pansement hydrocellulaire fourni. Si non découpé les douches sont autorisées avec ce pansement hydrocellulaire.

Rinçage de la sonde, hydratation et administration du médicament.

Avant la mise en place du dispositif ENFit® dans sa position finale, et après toutes les connexions et déconnexions, vérifier la bonne liaison et fixation des éléments connectables.

- Rincer la sonde avec de l'eau avant chaque administration, à l'aide de la seringue ENFit® 60ml.
- Connecter la seringue ENFit® 60ml à la sonde et injecter la solution selon le protocole établi par le médecin et les instructions du fabricant de la sonde.
- Rincer la sonde avec de l'eau après chaque administration, à l'aide de la seringue ENFit® 60ml.
- Refermer la sonde à l'aide d'un bouchon ENFit®
- Fixer la sonde à l'aide du sparadrap.

Contre-indications:

Les gants contiennent du latex ne pas utiliser en cas d'allergie ou de risque d'allergie au latex.

Conditions de conservation :

Les nécessaires de soin doivent être conservés en accord avec les températures indiquées sur la boîte.

Conserver loin de toute source de chaleur et d'humidité. Conserver à l'abri de la lumière du soleil.

Durée de péremption :

Reportez-vous aux informations figurant sur la boîte.

Elimination :

Conformément à la législation en vigueur pour le transport et le traitement des dispositifs médicaux souillés.

Matéiovigilance :

Tout incident ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.