

Set d'extension CARESITE avec dispositif d'accès Luer CARESITE et connecteur Spin-Lock

DESTINATION : LES SETS D'EXTENSION CARESITE sont des dispositifs stériles à usage unique pour l'injection directe, la perfusion intermittente, la perfusion continue ou l'aspiration de liquides, de médicaments, de sang et de produits sanguins. Le dispositif est accessible via le dispositif d'accès Luer CARESITE lors de l'insertion d'un raccord Luer mâle.

GROUPE DE PATIENTS CIBLE : Les sets d'extension peuvent être utilisés pour tous les patients qui nécessitent un traitement IV.

UTILISATEUR PRÉVU : Les sets d'extension sont utilisés par des cliniciens qualifiés, sur prescription d'un médecin.

AVERTISSEMENT : LA RÉUTILISATION DE DISPOSITIFS À USAGE UNIQUE PRÉSENTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LE PATIENT OU L'UTILISATEUR. CELA PEUT ENTRAÎNER UNE CONTAMINATION ET/OU UNE ALTÉRATION DE LA FONCTIONNALITÉ. LA CONTAMINATION ET/OU LA LIMITATION DE LA FONCTIONNALITÉ DU DISPOSITIF PEUVENT ENTRAÎNER CHEZ LE PATIENT DES BLESSURES, DES MALADIES OU LE DÉCÈS.

PRÉCAUTION : NON CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC DES INJECTEURS SOUS PRESSION.

ÉLIMINATION : À éliminer conformément aux directives locales et/ou aux protocoles cliniques.

NOTE À L'UTILISATEUR : Tous les incidents graves liés à ce produit doivent être signalés à B. Braun et l'autorité compétente dans le pays où le produit est utilisé.

NOTICE D'UTILISATION : utiliser une méthode aseptique.

- Inspecter visuellement le système de barrière stérile pour vérifier qu'il n'y a pas de brèches et qu'il est intègre avant de l'utiliser. Ne pas utiliser si le conditionnement ou le produit sont endommagés ou contaminés, ou si les capuchons protecteurs sont manquants ou ne sont pas en place. L'utilisation d'un dispositif endommagé ou contaminé peut entraîner chez le patient des blessures, des maladies ou le décès.
 - Remplacer le set conformément aux directives de l'établissement.
 - Pour accéder au dispositif d'accès Luer CARESITE : Frotter vigoureusement le dessus du dispositif d'accès Luer pendant 15 secondes avec de l'alcool isopropylique à 70 % et laisser sécher avant utilisation. Utiliser un raccord Luer sans aiguille. Rincer après chaque administration de médicament conformément aux directives de l'établissement, en fixant complètement le dispositif au raccord entre les rinçages.
1. Amorcer le set d'extension pour s'assurer que l'air est expulsé.
 2. Fixer fermement les raccords aux raccords souhaités. L'illustration de l'étiquette sert uniquement de référence.



Longueur 15 cm

VOL

VOLUME :
6,1 ml/m (40 °C)
7,1 ml/m (40 °C / 2



B. Braun Medical Inc.
Bethlehem,
PA 18018-3524 USA

EC REP

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen - DE

STERILE EO

CE 0123



Rédaction interne 08/03/2024
Mise à jour Rev.1 15/01/2026