

Bouchon désinfectant SwabCap™ pour embouts sans aiguille

Stérile. Utiliser une technique aseptique. Ce dispositif n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. Ce dispositif n'est pas fabriqué avec du DEHP. Ces produits sont couverts par un ou plusieurs brevets aux États-Unis et dans le monde.

Description :

Le SwabCap est un capuchon de connecteur sans aiguille qui contient 70% d'alcool isopropylique désinfectant.

Utilisation prévue :

Les bouchons SwabCap sont conçus pour être utilisés sur des embouts sans aiguille écouvillonnables dans le but de les protéger de toute contamination. Les bouchons Swab-Cap servent non seulement d'obstacle matériel à la contamination entre les accès des voies, mais également de nettoyant désinfectant à utiliser avant d'accéder aux voies. Les bouchons SwabCap désinfectent l'embout trente (30) secondes après leur mise en place et permettent de maintenir la surface de l'embout désinfectée jusqu'à sept (7) jours s'ils ne sont pas retirés.

Attention: Produit à usage unique. Ne pas réutiliser ni stériliser de nouveau.

Précautions :

- Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé ou ouvert avant utilisation.
- Ne pas congeler. Ne pas utiliser si le produit ne contient pas d'alcool .
- A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage.
- Le retrait du bouchon SwabCap doit être effectué à deux mains, afin de garantir que l'embout sans aiguille n'est pas retiré accidentellement.
- La réutilisation a un impact négatif sur les performances / la stérilité, pouvant potentiellement provoquer le dysfonctionnement / la contamination du produit.
- Selon le droit fédéral (États-Unis), cet appareil peut être vendu uniquement par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé et manipulé uniquement par le personnel médical formé. Il convient de s'assurer que les enfants ne manipulent pas le dispositif sans surveillance.
- Ce dispositif doit être changé en conformité avec les recommandations établies reconnues en matière de thérapie intraveineuse.
- Éliminez le dispositif en conformité avec le protocole de votre établissement.

Remarque: Conçu pour être utilisé et manipulé uniquement par le personnel médical, assurez-vous que les enfants ne puissent pas le manipuler sans surveillance.

Mode d'emploi

Installation

1. Une fois le cathéter et la voie d'accès du patient rincés, inspectez l'emballage de la protection du support du bouchon SwabCap.
2. Retirez la protection en tirant la languette.
3. Ne retirez pas le bouchon SwabCap du support en plastique blanc.
4. Tenez l'embout sans aiguille d'une main tout en poussant et en faisant pivoter le bouchon SwabCap sur l'embout de l'autre main, dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Une fois le bouchon SwabCap correctement mis en place, enlevez doucement le support en plastique blanc en le retirant de l'embout sans aiguille.
6. Veillez à ce que le bouchon SwabCap soit bien assemblé sur le dispositif et à ce que l'embout sans aiguille soit bien fixé. Serrez-le si nécessaire.
7. Les bouchons SwabCap désinfectent l'embout trente (30) secondes après leur mise en place et permettent de maintenir la surface de l'embout désinfectée jusqu'à sept (7) jours s'ils ne sont pas retirés.

Les embouts sans aiguille doivent être remplacés conformément aux directives de l'établissement ou aux instructions d'utilisation du fabricant de l'embout.

Retrait

1. Le retrait du bouchon SwabCap doit être effectué à deux mains, afin de garantir que l'embout sans aiguille n'est pas retiré accidentellement.
2. Pour retirer le bouchon, saisissez l'embout sans aiguille et faites tourner le bouchon SwabCap dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Retirez le bouchon SwabCap et jetez-le.
4. Vérifiez que le connecteur sans aiguille est correctement relié au cathéter.
5. Le connecteur est prêt à l'emploi. Aucun écouvillonnage supplémentaire n'est nécessaire.
6. Éliminez le dispositif en conformité avec le protocole de votre établissement

DF-4948 Rev 02 (8/20)

