

DISPOSITIF DE PERFUSION INTRAVEINEUSE À CONNECTEUR(S) CLAVE®

Appliquer une technique aseptique. À usage unique - Ne pas restériliser. Stérile, Apyrogène lorsque l’emballage est intact et scellé d’origine.

MODE D’EMPLOI :

1. Ouvrir l’emballage à l’endroit indiqué et sortir le dispositif. 2. Préparer le récipient de soluté à injecter conformément aux consignes du fabricant. 3. Fermer la pince et la prise d’air du dispositif. Enlever le capuchon d’extrémité de la pointe et insérer cette dernière dans le récipient de soluté. 4. Suspendre le récipient de soluté et amorcer la chambre d’injection en la remplissant à peu près à moitié (en serrant au besoin). Ne pas trop remplir. 5. Ouvrir la pince et amorcer le dispositif conformément au protocole de l’établissement. Retourner le ou les connecteurs CLAVE pour chasser l’air. 6. Retirer le capuchon d’extrémité et raccorder l’embout Luer mâle du dispositif amorcé à l’instrument de ponction veineuse voulu. 7. Écouvillonner le joint silicone du ou des connecteurs CLAVE conformément au protocole de l’établissement. 8. Raccorder la tubulure à perfusion ou la seringue voulue au ou aux connecteurs CLAVE. 9. Toujours rincer le connecteur CLAVE après l’emploi conformément au protocole de l’établissement.

Attention :

- Ne pas utiliser d’aiguilles ni de raccords Luer sur les connecteurs CLAVE.
- Une réutilisation (d'un dispositif) a un impact négatif sur la performance / La stérilité résulte potentiellement d'un défaut produit / contamination.
- Le connecteur CLAVE est compatible avec les luers d’un diamètre interne compris entre 1,55 mm et 2,8 mm.
- Il est recommandé de remplacer ce dispositif conformément au protocole agréé de l’établissement.

DF-4095 Rev 04



ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673 USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover - DE

