

Perforateur pour flacon ventilé avec Clave / MicroClave
Pour utilisation multi-doses sur flacons et bouteilles avec fermetures de 20 ou 28 mm.

Utiliser une technique aseptique. Usage unique. Ne pas restériliser. Circuit de fluide stérile, apyrogène si l'emballage n'est pas ouvert ni endommagé.

MODE D'EMPLOI:

1. Préparer la fermeture et le bouchon du flacon du médicament selon les instructions du fabricant.
2. Retirer le perforateur pour flacon de son emballage et le capuchon protecteur du perforateur.
3. Centrer le perforateur pour flacon sur le bouchon et appuyer vers le bas jusqu'à ce que le perforateur traverse le bouchon et deviennent solidaire du flacon. Pour les dispositifs avec systèmes de fixation, veuillez à ce que les fixations soient bien verrouillées sur le col du flacon.
4. Pour perfuser le diluant dans le flacon, placer le flacon à la verticale sur le plan de table. Fixer la seringue du diluant au Clave/MicroClave en la faisant tourner jusqu'à ce que l'ensemble soit parfaitement solidaire. Perfuser le diluant dans le flacon et agiter selon les instructions du fabricant. Ne pas perfuser liquids ou de l'air dans le flacon lorsqu'il est renversé, car cela bloquerait filtre et gêner la ventilation.
5. Pour aspirer du liquide du flacon, désinfecter le Clave/MicroClave conformément au protocole de l'établissement. Fixer la seringue au Clave/MicroClave en appuyant et en la faisant tourner jusqu'à ce que l'ensemble soit parfaitement solidaire. Renverser le flacon et aspirer la quantité de liquide appropriée.

Si vous utilisez un Spiros™ fermé, un ensemble secondaire de bouteille peut être suspendu pour l'administration.

ATTENTION:

- Non compatible avec N.N-Dimethylacetamide; Busulfan (Busulfex®, Myleran®)
- Le Clave/MicroClave permet un accès multi-doses. Ne pas retirer le perforateur du flacon ; le mettre au rebut avec le flacon.
- Ne pas utiliser d'aiguilles ou de bouchons luer sur les Clave/MicroClave.
- Contient du polycarbonate.
- Une réutilisation (d'un dispositif) a un impact négatif sur la performance / La stérilité résulte potentiellement d'un défaut produit / contamination.
- Si le débit diminue, changer l'adaptateur pour flacons. Le raccord Clave/MicroClave est compatible avec les raccords Luer de diamètre interne (ID, internal diameter) compris entre 1,55 mm et 2,8 mm.
- Selon la loi fédérale des États-Unis, l'utilisation et la vente de ce dispositif sont limitées à un médecin ou à une personne agissant sous l'autorité de celui-ci.

DF-4061 Rev 09



ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673 USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover - DE

