


Aiguille Eclipse™ avec la technologie SmartSlip™

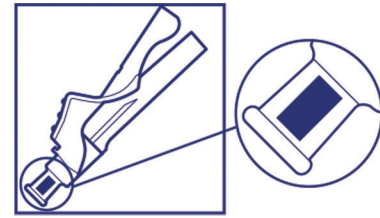

1) Pousser fermement pour attacher l'aiguille à la seringue. Pousser en arrière le capuchon de sécurité. Saisir la seringue d'une main et de l'autre, enlever le protecteur de l'aiguille en le tirant tout droit.

Biseau vers le haut = Capuchon de sécurité vers le haut.

Prélever le médicament et l'administrer conformément au protocole établi.

2) Activer le mécanisme de sécurité immédiatement après l'injection. Centrer le pouce ou l'index sur l'appui-doigt antidérapant et pousser le capuchon de sécurité vers l'avant sur l'aiguille jusqu'à entendre ou sentir un déclic. Confirmer visuellement que l'aiguille est recouverte. Si l'activation n'est pas possible, jeter immédiatement dans un collecteur approuvé pour objets tranchants/piquants.

3) Utiliser la technique à une main et activer la sécurité en orientant l'aiguille loin de soi et des autres personnes. Pour assurer la plus grande sécurité, utiliser **UNIQUEMENT** l'appui-doigt antidérapant pour activer le capuchon de sécurité.

L'activation du mécanisme de sécurité peut causer des projections minimales du liquide restant sur l'aiguille après l'injection.

Jeter après une seule utilisation dans un collecteur approuvé pour objets tranchants/piquants conformément aux règlements applicables et au protocole de l'établissement.

Apyrogène. Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé.

MISE EN GARDE


Lorsque le transport d'une seringue pleine est autorisé/requis par les procédures locales/institutionnelles, utiliser une technique de recouvrement passif pour recouvrir l'aiguille avant de la transporter au point d'administration.

La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices.

Pour aider à éviter l'infection par le VIH (SIDA), le VHB (hépatite) et autres infections provenant de piqûres d'aiguille accidentelles, activer le mécanisme de protection immédiatement après utilisation.

Ne pas autoclaver l'aiguille BD Eclipse™ avant l'utilisation.

DGP7403 8365117 Rev. 2011-11

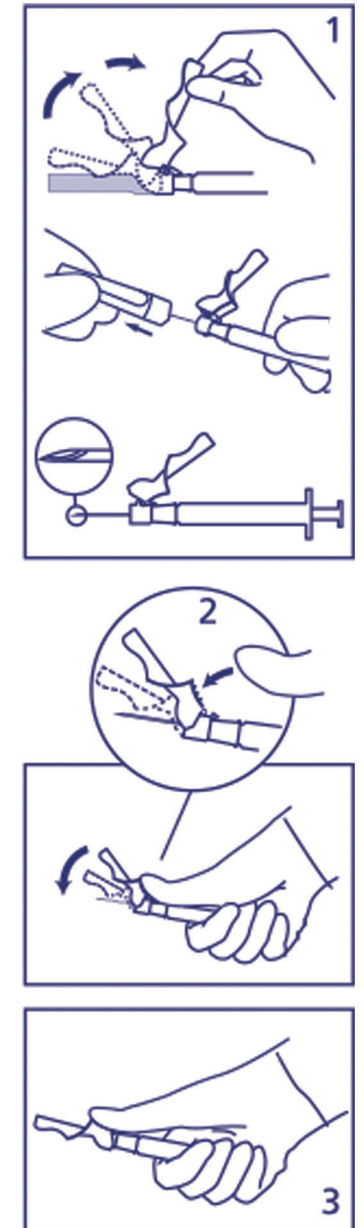

Becton, Dickinson and Company,
1 Becton Drive, Franklin Lakes,
NJ 07417 USA



BD Distribution Centre
Laagstraat 57
B-9140 Temse - BE



Rédaction interne 11/03/2024