

OptiLube : sachets 1123 2.7g - 1120 5g
Ceci est une notice d'information sur le produit pour l'utilisateur.

OptiLube a été recommandé/prescrit pour vous par un professionnel de la santé. Ne le partagez pas avec quelqu'un d'autre. Lisez toute la notice d'information sur le produit avant utilisation et conservez-la pour votre information. Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'utiliser ce produit, ou s'il vous convient, veuillez consulter un médecin.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

OptiLube est un gel lubrifiant stérile, transparent et hydrosoluble, dont le pH est compris entre 5,0 et 7,0.

COMPOSITION :

- Eau purifiée • Polyéthylène glycol (PEG) • Glycérine • Carbomère • Hydroxyde de sodium • Esters d'acide 4-hydroxybenzoïque

UTILISATION PRÉVUE :

OptiLube est un dispositif médical sous forme de gel lubrifiant stérile, soluble dans l'eau, destiné à l'insertion en douceur de dispositifs médicaux et d'examens, afin de réduire le risque de traumatisme pendant les procédures, notamment : • L'insertion de cathéters • L'endoscopie • Les examens gynécologiques • Les examens rectaux • La cytoscopie

UTILISATEUR PRÉVU :

Les utilisateurs prévus d'**OptiLube** sont les patients, leurs soignants et/ou les professionnels de la santé.

CONTRE-INDICATIONS :

N'utilisez pas **OptiLube** si vous êtes sensible ou allergique à l'un des ingrédients du dispositif.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Il est recommandé d'utiliser **OptiLube** conformément aux politiques et procédures de santé locales, après examen du patient par un professionnel de santé. S'assurer qu'**OptiLube** est adapté à l'utilisation prévue et compatible avec les autres dispositifs médicaux qui seront utilisés en même temps. **Optilube** n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

N'utilisez pas **OptiLube** s'il est endommagé ou si le sceau est brisé.

Conserver hors de portée des enfants. Appliquez la quantité de lubrifiant nécessaire à la procédure. Ne pas appliquer sur l'oeil. La réutilisation de ce dispositif médical peut entraîner une infection et/ou une contamination croisée. La stérilisation, le retraitement, le nettoyage et la désinfection peuvent également compromettre les caractéristiques du produit, entraînant un traumatisme ou une infection pour le patient.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES :

Il n'y a pas de réactions indésirables connues associés à l'utilisation d'**OptiLube** ; cependant, dans de rares cas, une irritation locale ou une hypersensibilité peut survenir. Les symptômes d'irritation ou d'hypersensibilité comprennent des rougeurs, des démangeaisons ou des cloques. Si cela se produit, cessez d'utiliser **OptiLube** et consultez votre professionnel de la santé. Si les symptômes progressent soudainement ou s'aggravent, ce qui peut inclure des vertiges, des difficultés respiratoires, de la confusion, ou de l'anxiété, veuillez contacter immédiatement votre médecin. Tout incident ou dysfonctionnement grave survenu en lien avec OptiLube doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

COMMENT L'UTILISER ?

Consultez votre professionnel de la santé habituel pour obtenir des conseils avant d'utiliser **OptiLube**. N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou ouvert par inadvertance avant utilisation.

SACHETS : Stériles et à usage unique. Déchirez le sachet à une extrémité et appliquez le produit selon les besoins.

DISPOSITIFS STÉRILES :

OptiLube est fourni stérile. **OptiLube** est stérilisé par rayons gamma après le processus de conditionnement. Ne pas restériliser.

CONSERVATION ET MANIPULATION: Garder au sec. Tenir à l'abri de la lumière du soleil. Refermez le bouchon du tube entre chaque utilisation. Les emballages non ouverts ont une durée de conservation de 5 ans. Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration. Conserver entre 5°C et 40°C.

ÉLIMINATION:

OptiLube doit être éliminé conformément aux politiques locales et aux procédures d'élimination des déchets, ceci incluant tous les accessoires/consommables utilisés avec l'appareil.
OL-IFU-Nov24-V21.0

Rédaction interne 08/03/2024
Mise à jour Rev.3 01/12/2025