

Conteneurs à usage chirurgical (Barquettes et bols)

DISPOSITIFS

Cupules chirurgicales - Plateaux (inclut les plateaux réniformes et les plateaux de laparoscopie-endoscopie) - Bassins (inclut les bassins ronds, les bassins de placenta et les bassins rectangulaires) - Cruches - Couvercles (inclut les couvercles de cupule chirurgicale et les couvercles pour bassin).

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF

Large gamme de conteneurs à usage chirurgical unique conformes aux normes de qualité les plus strictes. Dispositifs médicaux appartenant à la Classe IIa du fait de leurs larges indications d'utilisation approuvées, y compris lors de procédures invasives. Certaines références disposent d'un couvercle approprié ainsi que d'adhésifs pour la fixation aux surfaces. Les professionnels de la santé doivent choisir un dispositif ayant une capacité appropriée et un design adaptés à l'usage spécifique prévu.

DESTINATION ET INDICATIONS

Les cupules chirurgicales, les plateaux, les bassins et les cruches : -Maintenir temporairement des organes ou des tissus - Contenir ou préparer des dispositifs médicaux tels que des cathéters avec des solutions médicamenteuses - Destiné à contenir des solutions médicinales, telles que des solutions salines, des produits de contraste, de l'héparine, des anesthésiques (par exemple, la ropivacaïne) ou des analgésiques (par exemple, le sufentanil), pour injection, préparation, mélange ou dilution. - Contenir des solutions aqueuses et salines pour l'irrigation - Contenir des solutions aqueuses, salines ou antiseptiques pour le nettoyage de plaies - Contenir des antiseptiques destinés à la désinfection de la peau ou des muqueuses.

En outre, et en raison de leur design les Bassins de placenta sont destinés à être utilisés pour:

: Destinés spécifiquement à maintenir temporairement le placenta et/ou le cordon ombilical en vue d'une inspection après la naissance et de la préparation de la membrane placentaire qui peut ensuite être utilisée dans un contexte tel que le soin des plaies.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Conçus pour être utilisés de manière stérile - Incompatible avec la préparation de ciment osseux - Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances - Avant utilisation, vérifier visuellement la présence de particules et n'utiliser que si les contenus sont clairs - Pour la préparation des produits injectables, utilisez une aiguille filtre. Sachez que les récipients ouverts peuvent augmenter le risque de contamination.

- Pour les procédures invasives ophtalmiques, rincer le conteneur à usage chirurgical avec une solution stérile avant utilisation - Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé - Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels - Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.

La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément au règlement (UE) 2017/745, nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou l'altération permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

SYMBOLES D'ETIQUETAGE : 1) Représentant agréé au Royaume-Uni 2) Marque déposée

IFU551999114. Rev. 6 (28-11-2025)