


Description:
Protectfilm® est une gamme de pansements protecteurs transparents composés d’un film fin de polyuréthane résistant aux bactéries, aux virus et à l’eau, revêtu d’un adhésif hypoallergénique.
Disponible avec système de pose sous la marque Protectfilm® Frame Style pour une manipulation plus facile.
Protectfilm® Adhesive border est un film protecteur transparent très respirant en polyuréthane avec un bord adhésif et une zone centrale sans adhésif afin d’éviter toute adhérence indésirable avec le lit de la plaie et permet de retirer le pansement sans douleur ni traumatisme.

- Usage Prévu:**
- Comme pansement primaire, il convient pour couvrir et protéger les plaies sèches ou à légère exsudation telles que : égratignures, lacérations et zones de friction.
 - Comme pansement secondaire, il est utilisé comme dispositif de fixation, pour fixer les sites de cathéters et pour couvrir d’autres pansements primaires comme les alginates, les hydrogels, les hydrofibres et les mousses.

- Précautions:**
- La stérilité du pansement est garantie sauf si la pochette est endommagée ou a été ouverte avant utilisation.
 - Réservé à un usage unique. La réutilisation est susceptible d’entraîner une contamination croisée.
 - Ne doit pas être utilisé après la date d’expiration.
 - Ne doit pas être utilisé chez les patients ayant une sensibilité à l’adhésif acrylique.
 - Ne doit pas être utilisé sur les blessures infectées ou qui saignent sauf sous surveillance médicale.
 - Une application répétée peut causer des dommages cutanés aux patients ayant une peau fine ou fragile.

- Consignes D’utilisation:**
1. Nettoyer la plaie et sécher soigneusement la peau avoisinante.
 2. Retirer les protections du pansement.
 3. Observer le site à travers le film et centrer le pansement sur la plaie, ne pas étirer pendant l’application.
 4. Protectfilm® Frame Style ; retirer lentement le cadre tout en lissant les bords du pansement, puis lisser l’ensemble du pansement du centre vers les bords en exerçant une pression ferme pour améliorer l’adhérence.

Instructions d’utilisation AA56

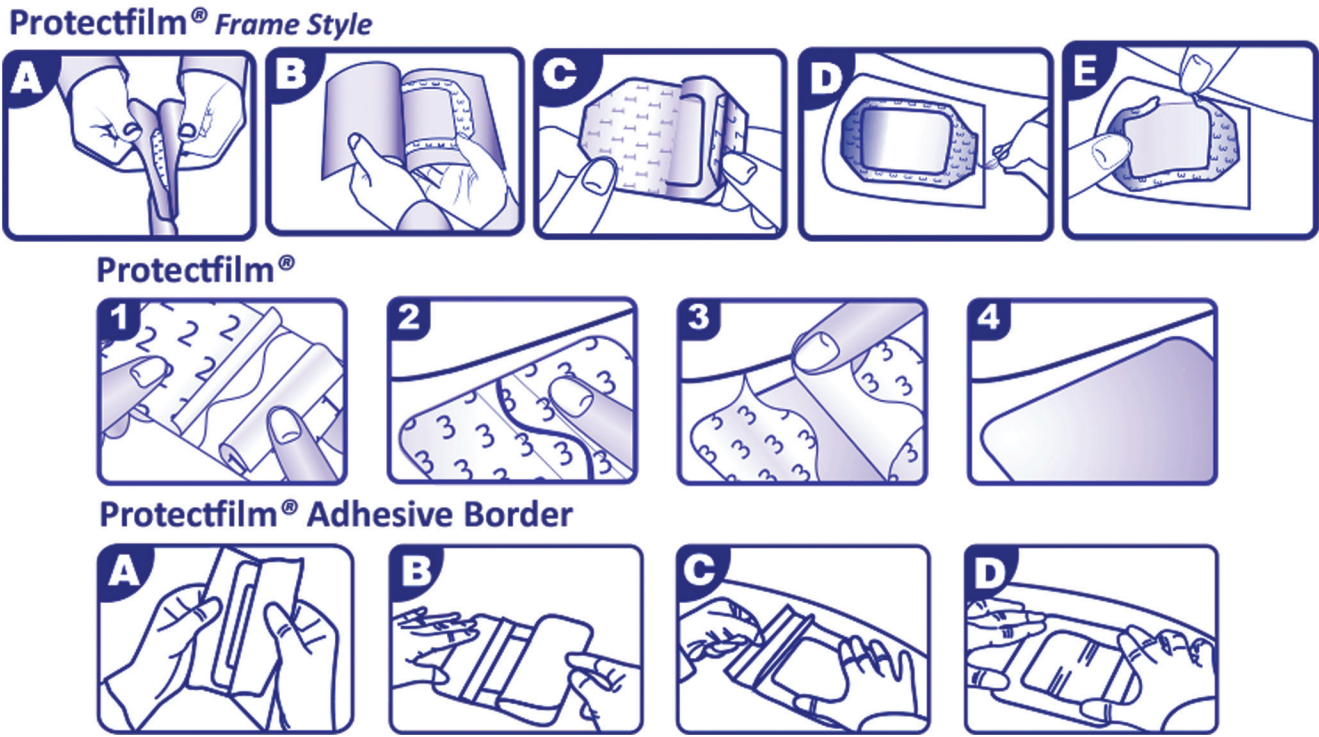

 Pharmaplast S.A.E.
Amria, Free Zone 23512,
Alexandria - EG

EC	REP
----	-----

 E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2, D02 R744 - IE

