

Description du produit : Les pansements comportent un support film fin avec un adhésif au potentiel allergisant et sans latex. Les pansements avec bordures présentent des encoches et sont renforcés d'un ruban en tissu doux pour renforcer l'étanchéité autour des cathéters et autres dispositifs. Ce pansement est perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau, permettant ainsi à la peau de respirer. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus.* Un pansement intact protège le site de toute contamination extérieure. *Des essais in vitro ont démontré que le film transparent fait écran aux virus d'au moins 27 nm de diamètre, à condition que le pansement reste intact et ne présente aucune fuite.

Indications d'utilisation : Les pansements peuvent être utilisés pour recouvrir et protéger les sites de cathéters et les plaies, pour maintenir un environnement humide pour la cicatrisation ou pour faciliter le débridement autolytique, comme pansement secondaire, comme protection au-dessus d'une peau à risque, pour fixer des dispositifs sur la peau, pour recouvrir les brûlures au premier ou au deuxième degré et pour recouvrir et protéger les yeux. Ne pas utiliser le pansement en remplacement de sutures ou d'autres méthodes de sutures primaires des plaies.

Avertissement : L'utilisation du pansement pour recouvrir un patch d'administration de médicament pourrait accélérer l'absorption et renforcer le risque de surdose. Ne pas réutiliser ce produit. Une réutilisation pourrait entraîner une infection ou une autre maladie/blessure.

Précautions : 1. Arrêter tout saignement sur le site avant d'appliquer le pansement. 2. Ne pas étirer le pansement pendant l'application car la tension pourrait créer une lésion cutanée. 3. S'assurer que la peau est propre, exempte de résidus de savon et de lotion et qu'elle a pu sécher correctement avant d'appliquer le pansement afin d'éviter toute irritation de la peau et de garantir une bonne adhésion. 4. Le pansement peut être utilisé sur un site infecté, uniquement par un professionnel de santé. 5. Les onguents antimicrobiens contenant des polyéthylènes glycols peuvent compromettre la solidité des pansements films transparents 3M™Tegaderm™ HP. **Utilisateurs prévus et mode d'emploi :** Les utilisateurs prévus sont les professionnels de santé qui respectent les instructions d'utilisation et les illustrations d'application sur la face arrière du pansement. Pour une adhésion optimale, appliquer une pression ferme mais délicate sur l'ensemble du pansement.

Péremption/Élimination : Pour la durée de conservation, se référer à la date de péremption imprimée sur chaque emballage. Si l'emballage stérile est endommagé ou ouvert involontairement avant utilisation, éliminer le produit et ne pas l'utiliser.

Remarque : mettre le produit au rebut conformément au protocole de l'établissement.

Informations destinées au client : Veuillez signaler tout incident grave survenant en lien avec ce dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale. Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, 34-8728-7794-8, Issue Date: 2023-03

rédaction interne 04/04/2024

Mise à jour Rev.01 07/10/2024