



Pharmacoll® Extra Thin pansement hydrocolloïde

Pharmacoll®, Pharmacoll® Thin, Pharmacoll® Extra Thin, Pharmacoll® Cushion

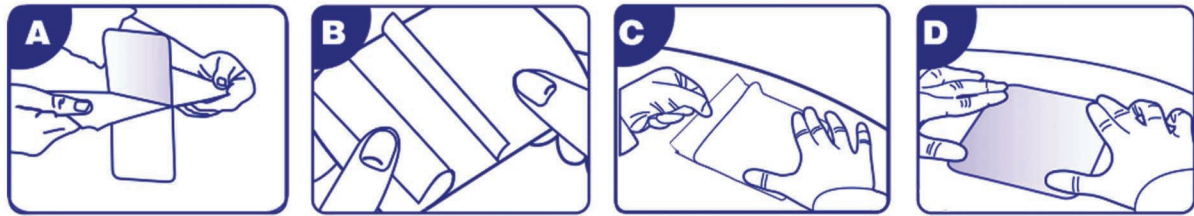

Pharmacoll® Comfort

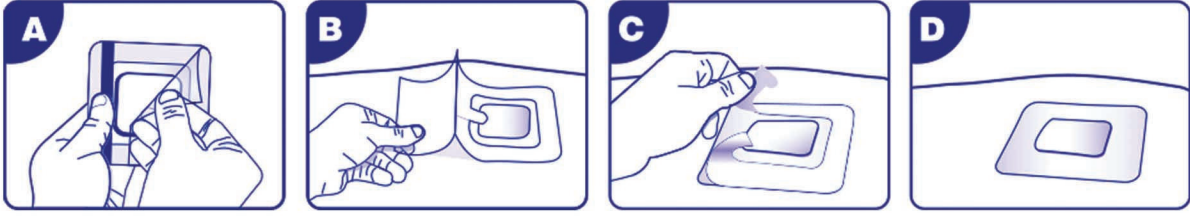

Pharmacoll® Comfort Plus



Description :

Les produits de la gamme Pharmacoll® sont des pansements hydrocolloïdes adhésifs sans gélatine associés à une couche en film semi-perméable, imperméable et résistante aux bactéries en polyuréthane. Le pansement se transforme en gel lorsqu'il absorbe les exsudats de la plaie, ce qui crée un environnement humide favorisant la granulation et l'épithélialisation. La création du gel empêche le pansement de coller aux plaies. Celui-ci peut ainsi être retiré sans causer de douleur et sans endommager la granulation du tissu épithélial.

Usage Prévu :

Les pansements de la gamme Pharmacoll® sont indiqués pour les : • Ulcères dermiques partiels et de pleine épaisseur. • Ulcères diabétiques, de pression et de jambe. • Brûlures (de premier et deuxième degré) • Sites donneurs d'une greffe de peau et greffes de peau. • Plaies superficielles/égratignures légères. • Protection des peaux fragiles ou des zones exposées aux frottements, tels que les coudes, talons ou la région du sacrum. • Les plaies de stomies pour protéger la peau contre l'effluent stomal. • Pansements chirurgicaux pour protéger les sutures. • Érythème fessier du nourrisson.

Contre-indications:

Ne pas utiliser chez un patient ayant une sensibilité connue au produit ou à l'un de ses composants, particulièrement les polyisobutènes et la carboxyméthylcellulose.

Précautions :

• La stérilité est garantie à moins que la pochette ne soit endommagée. • Le traitement des ulcères de peau doit être intégré à un plan défini de prise en charge des ulcères, sous surveillance d'un professionnel de santé. • Lorsqu'un pansement hydrocolloïde est utilisé, la plaie peut paraître plus importante et plus profonde au départ car le tissu inutile est éliminé. Cette augmentation de volume doit s'accompagner d'une amélioration de l'aspect de la plaie. Si la plaie s'élargit après les premiers changements de pansements, consulter un professionnel de santé. • Observer la plaie afin de détecter tout signe d'infection. En cas d'infection, consulter un professionnel de santé. Les signes d'une infection sont fièvre, douleurs plus importantes, rougeurs, saignements, gonflements, odeurs ou écoulements inhabituels. Les pansements hydrocolloïdes peuvent être utilisés sur des plaies infectées uniquement sous la surveillance d'un professionnel de santé. • Dans de rares cas, certaines plaies traitées par pansement hydrocolloïde peuvent présenter une irritation (rougeurs, inflammation), une macération (blanchissement de la peau) ou hyper-granulation (formation de tissu excessif). Le cas échéant, consulter un professionnel de santé. • Si la plaie ne montre pas de signes de cicatrisation ou si d'autres symptômes inattendus apparaissent, consulter un professionnel de santé. • Ne doit être utilisé qu'une seule fois. La réutilisation de ce pansement entraîne un risque d'infection croisée et d'efficacité réduite du produit.

Consignes D'utilisation :

1. Laver la zone autour de la plaie. 2. Évaluer la plaie et choisissez une taille de pansement permettant de recouvrir 2,5 cm (1 pouce) de peau au-delà des bords de la plaie d'adhésif hydrocolloïde. 3. Ouvrir la pochette et manipuler le pansement en portant des gants/avec une pince. 4. Retirer la protection du pansement. 5. Placer le pansement au-dessus de la plaie et la zone autour de la plaie et appuyer délicatement sur le côté adhésif du pansement. 6. Éviter d'étirer le pansement, car cela peut provoquer un traumatisme mécanique de la plaie et de la peau autour de la plaie. 7. Retirer le cadre du pansement, du haut vers le bas. Renforcer et lisser le bord en film du centre vers l'extérieur. Continuer le long d'un côté jusqu'à atteindre l'encoche. Répéter ce processus de l'autre côté jusqu'à avoir retiré toutes les parties du cadre. « Dans le cas de Pharmacoll® Comfort ».

Retrait du pansement :

1. Soulever délicatement les bords du pansement (ou bords du film) en appuyant sur la peau. 2. Continuer de décoller les bords jusqu'à ce qu'ils soient tous détachés de la surface de la peau. 3. Appuyer sur la peau pour décoller le pansement de la peau. 4. Retirer délicatement le pansement, puis le replier sur lui-même en le retirant délicatement dans le sens de pousse des poils. 5. Ou étirer le pansement horizontalement et le soulever. Cela facilite également le retrait dans la plupart des cas. 6. Jeter le pansement dans la poubelle de recyclage adaptée.

À quelle fréquence changer de pansement :

1. Le pansement doit rester en place aussi longtemps que possible. 2. En cas de fuite, le pansement doit être remplacé immédiatement. 3. Remplacer le pansement lorsque l'absorption maximale a été atteinte.

Text prepared 13062022