

Veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les autres notices et instructions incluses dans le nécessaire de soin car elles contiennent des informations importantes concernant l'utilisation de ce nécessaire de soin. Pour toute question contacter votre distributeur.

Utilisation prévue :

Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés pour l'entretien des sondes et le soin aux patients sous nutrition entérale à domicile.

Indications :

Patients adultes avec sonde d'alimentation nasogastrique.

Recommandations d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité des emballages. Ne pas utiliser si le blister est ouvert ou endommagé.
- Ne pas réutiliser : la réutilisation de l'assemblage peut provoquer une infection ou d'autres préjudices.
- Ne pas restériliser.
- Réaliser le soin conformément à la prescription médicale, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et dans le respect des bonnes pratiques.
- Utiliser une compresse pour chaque manipulation.
- Se laver les mains avec un savon antiseptique (non fourni) ou se désinfecter les mains par friction avec une solution hydroalcoolique (non fournie) avant et après toute manipulation.
- Bien refermer la boîte du nécessaire de soin après chaque utilisation.
- Ne pas ouvrir la boîte de compresses avec un objet coupant.
- Utiliser le tampon d'alcool sur peau saine, si des douleurs, des rougeurs ou des irritations apparaissent, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.
- Paire de ciseaux : Limite d'oxyde d'éthylène par dispositif sur 24h - 5 DM : 4MG pour une masse corporelle patient de 70kg.

Pose de la sonde :

- Ouvrir de façon aseptique les blisters des dispositifs médicaux nécessaires pour le soin.
- Enfiler les gants latex.
- Déposer le gel lubrifiant sur la sonde (non fournie) puis mettre la sonde en place selon le protocole établi par le médecin et les instructions du fabricant de la sonde.
- Vérifier sa position dans l'estomac selon le protocole établi par le médecin et les instructions du fabricant de la sonde.
- Mettre en place sur la joue le pansement hydrocolloïde découpé à la taille voulue à l'aide de la paire de ciseaux.
- Positionner la sonde dessus, si nécessaire fixer la sonde avec du sparadrap, et recouvrir entièrement le pansement hydrocolloïde et la sonde du pansement film.
- Obturer la sonde avec le bouchon ENFit®

Pour le soin quotidien.

- Ouvrir de façon aseptique les blisters des dispositifs médicaux nécessaires pour le soin.
- Enfiler les gants latex.
- Rincer la sonde avec de l'eau avant chaque administration, à l'aide d'une seringue ENFit® 60ml selon le protocole établi.
- Enlever le pansement hydrocolloïde et le pansement film polyuréthane et désinfecter si nécessaire à l'aide du tampon d'alcool.
- Procéder au soin du nez à l'aide du sérum physiologique et des compresses selon le protocole établi.
- Refaire le pansement à l'aide de la fixation pour sonde nasogastrique, du pansement hydrocolloïde du pansement film au préalable découpé (voir «pose de la sonde») et du sparadrap.

Rinçage de la sonde, hydratation et administration de médicaments.

- Avant la mise en place du dispositif ENFit® dans sa position finale, et après toutes les connexions et déconnexions, vérifier la bonne liaison et fixation des éléments connectables.
- Rincer la sonde avec de l'eau avant chaque administration, à l'aide de la seringue ENFit® 60ml.
- Connecter une seringue ENFit® 60ml à la sonde et injecter la solution selon le protocole établi par le médecin et les instructions du fabricant de la sonde.
- Rincer la sonde avec de l'eau après chaque administration, à l'aide d'une seringue ENFit® 60ml.
- Refermer la sonde à l'aide d'un bouchon ENFit®
- Fixer la sonde à l'aide du sparadrap.

Contre-indications :

Ne pas utiliser le tampon d'alcool sur des personnes allergiques à la solution d'alcool isopropylique. Les gants contiennent du latex ne pas utiliser en cas d'allergie ou de risque d'allergie au latex.

Conditions de conservation :

Les nécessaires de soin doivent être conservés en accord avec les températures indiquées sur la boîte. Conserver loin de toute source de chaleur et d'humidité. Conserver à l'abri de la lumière du soleil dans un environnement non corrosif et bien ventilé.

Durée de péremption :

Reportez-vous aux informations figurant sur la boîte.

Élimination :

Conformément à la législation en vigueur pour le transport et le traitement des dispositifs médicaux souillés. Le tampon d'alcool doit être éliminé comme un déchet médical après utilisation, l'alcool est inflammable. Ne pas entrer en contact avec le feu ou une température élevée et faire attention à la protection électrostatique.

Matéiovigilance :

Tout incident ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.