

Veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les autres notices et instructions incluses dans le nécessaire de soin car elles contiennent des informations importantes concernant l'utilisation de ce nécessaire de soin. Pour toute question contacter votre distributeur.

Utilisation prévue :

Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés pour l'entretien des sondes et le soin aux patients sous nutrition entérale à domicile.

Indications :

Patients nécessitant un traitement par apomorphine par voie sous cutanée et ayant été formés aux techniques et aux règles d'hygiène nécessaires.

Recommandations d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité des emballages. Ne pas utiliser si le blister est ouvert ou endommagé.
- N'ouvrir les emballages qu'au moment de l'utilisation afin de garantir la stérilité des dispositifs et limiter le risque de contamination.
- Ne pas réutiliser : la réutilisation de l'assemblage peut provoquer une infection ou d'autres préjudices.
- Ne pas restériliser.
- Réaliser le soin conformément à la prescription médicale, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et dans le respect des bonnes pratiques.
- Se laver les mains avec un savon antiseptique (non fourni) ou se désinfecter les mains par friction avec une solution hydroalcoolique (non fournie) avant et après toute manipulation.
- Utiliser une compresse pour chaque manipulation.
- Utiliser le tampon d'alcool sur peau saine, si des douleurs, des rougeurs ou des irritations apparaissent, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.
- Bien refermer la boîte du nécessaire de soin après chaque utilisation.
- N'ouvrir les blisters qu'au moment de l'utilisation afin de garantir la stérilité des dispositifs et limiter le risque d'infection microbienne
- Le pansement NT est à renouveler régulièrement s'il est saturé d'exsudats ou toutes les 24h au minimum. Ne pas réutiliser car risque infectieux et/ou perte de capacité d'absorption.

- Le pansement NT n'est pas destiné aux nouveaux nés, nouveau-nés prématurés ni aux nourrissons. Leur taux d'oxyde d'éthylène est supérieur à 4mg par dispositif médical et/ou supérieur à 10µg/cm².

Contact limité ≤ 24 heures				
Limite (mg/jour)				
	Adulte	Enfant	Nouveau-né	Prématuré
Poids (kg)	70.0	10.0	3.5	1.0
Oxyde d'éthylène	4.0	0.57143	0.20	0.06
Ethylène Chlorhydrate	9.0	1.29	0.45	0.129

Soin

- Imbiber les compresses avec les antiseptiques prescrits (non fournis).
- Désinfecter la peau saine avec le tampon d'alcool avant injection.
- Réaliser le soin.
- Recouvrir le point d'injection du pansement NT.

Contre-indications :

Ne pas utiliser le tampon d'alcool sur des personnes allergiques à la solution d'alcool isopropylique. Pour les pansements contenant des compresses en non tissé, risque d'irritation de la peau si sensibilité avérée à la viscosité. Le pansement NT seul est contre-indiqué pour le traitement des plaies profondes ou escarres, ou chez les patients hémorragiques non médicalisés.

Conditions de conservation :

Les nécessaires de soin doivent être conservés à une température ambiante. Conserver loin de toute source de chaleur et d'humidité. Conserver à l'abri de la lumière du soleil dans un environnement non corrosif et bien ventilé.

Durée de péremption :

Reportez-vous aux informations figurant sur la boîte.

Elimination :

Conformément à la législation en vigueur pour le transport et le traitement des dispositifs médicaux souillés. Le tampon d'alcool doit être éliminé comme un déchet médical après utilisation, L'alcool est inflammable. Ne pas entrer en contact avec le feu ou une température élevée et faire attention à la protection électrostatique.

Matéiovigilance :

Tout incident ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.