

La sonde est utilisée pour éliminer la plaque dentaire et d’autres débris, également utilisée pour éliminer les résidus de colle et autres matériaux de fixation des couronnes

VERIFICATION AVANT UTILISATION:

Vérifier que l’instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation .

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.

Ne pas utiliser si vous constater des défauts d’usinage (arêtes vives).

Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.

Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

Plage de température ambiante : 0°C à 50°C - Plage d’humidité relative : 30% à 75% - Plage de pression atmosphérique : 700 hPA à 1060 hPA

ELIMINATION:

Pour l’élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.

