

Les pinces Kocher sont utilisées dans presque toutes les interventions chirurgicales pour maintenir les tissus pendant l’opération ou pour comprimer les tissus qui saignent, pour contrôler les saignements et fermer les vaisseaux sanguins rompus.

VERIFICATION AVANT UTILISATION:

Vérifier que l’instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation .

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.

Ne pas utiliser si vous constater des défauts d’usinage (arêtes vives).

Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.

Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

L’utilisation de la pince Kocher pour le clampage du cordon ombilical doit se faire sous surveillance constante pour éviter tout risque de déclampage et doit être remplacée dans les plus brefs délais par un clamp de Bahr.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

Plage de température ambiante : 0°C à 50°C - Plage d’humidité relative : 30% à 75% - Plage de pression atmosphérique : 700 hPA à 1060 hPA

ELIMINATION:

Pour l’élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.

