

Les pinces porte tampon ou à pansement sont utilisées pour le maintien des compresses et tampons ou pour retirer des pansements sans utiliser les mains ou les doigts.

VERIFICATION AVANT UTILISATION:

Vérifier que l'instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation .

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.

Ne pas utiliser si vous constater des défauts d'usinage (arêtes vives).

Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.

Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

Plage de température ambiante : 0°C à 50°C - Plage d'humidité relative : 30% à 75% - Plage de pression atmosphérique : 700 hPA à 1060 hPA

ELIMINATION:

Pour l'élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.



SURGIKARE
Toor Abad Daska Road,
Sialkot, Punjab - PK



Obelis
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels - BE

