

Gants d'examen en nitrile sans poudre,

Avertissement : Ce gant ne contient pas de latex mais des adjuvants de vulcanisation et des stabilisants susceptibles de provoquer des allergies de type IV (dithiocarbamates). Ne pas utiliser en cas d'intolérance à ces substances. Polysem Medical est une marque déposée. Pour usage unique. Contrôler l'absence de dommage avant emploi, ne pas utiliser les gants endommagés. La longueur du gant est appropriée à l'utilisation finale où le risque au niveau du poignet est minime.

Tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Instructions : Lavez-vous les mains avant d'enfiler le gant et après l'avoir retiré. Ne touchez jamais l'extérieur du gant jetable à main nue.

Il est essentiel de choisir la taille correspondant à la taille des mains pour la santé du professionnel, la précision de ses gestes et son confort.

Prenez un gant et enfiler-le. Une fois enfilé, ne touchez pas l'environnement du soignant. Cessez d'utiliser le gant en cas de symptômes d'allergie.

Les gants sont à usage unique. Après utilisation, retirez le gant et jetez-le conformément aux protocoles en vigueur dans les établissements.

BOITE GN200NP 89/78/67 HARTALEGA V22 du 04/11/2024



DIDACTIC
216 rue Roland Moreno .
76210 Saint-Jean-de-la-Neuville. FR



Date de rédaction interne 03/04/2024

Mise à jour Rev.01: 30/09/2025