

Aiguille Spinale Biseau de Quincke

OBSERVER LES PRECAUTIONS UNIVERSELLES POUR TOUS LES PATIENTS. ALERTER IMMEDIATEMENT LE SERVICE QUALIFIE EN CAS DE PIQURE ACCIDENTELLE ET SUIVRE LE PROTO-COLE ETABLI.

- Une piqûre percutanée avec une aiguille contaminée peut causer des maladies graves telles que l'hépatite, le SIDA (VIH) ou autres maladies infectieuses.
- Ne pas réinsérer l'aiguille dans sa gaine de protection.

APYROGENE - STERILE: sauf si le conditionnement a été ouvert ou endommagé. NE PAS RÉUTILISER.

Comme pour toute procédure de rachianesthésie ou de prélèvement de liquide céphalorachidien, NE PAS ESSAYER DE REDRESSER UNE AIGUILLE COURBEE POUR NE PAS LA BRISER. Prendre soin de ne pas endommager l'aiguille. Le repositionnement répété peut augmenter le risque de brisure d'aiguille. Observer soigneusement l'aiguille pendant les procédures. Retirer ensemble l'aiguille spinale et son introducteur. Remplacer par une aiguille neuve. S'ASSURER QUE LA SERINGUE EST FERMEMENT ENFONCÉE DANS L'EMBASE DE L'AIGUILLE.

A utiliser uniquement par des professionnels de la santé qualifiés et formés.

MISE EN GARDE : En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu qu'à un médecin ou sur son ordre.

La réutilisation peut produire une infection ou autre maladie/préjudice..

© 2017 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. bd.com

DGP15803 Rev. 2017-10

