

3M™ Steri-Strip™ Sutures cutanées,

Description du produit • Les sutures cutanées 3M™ Steri Strip™ sont fabriquées dans un matériau poreux non-tissé. Elles sont renforcées de filaments pour être plus résistantes. • Les sutures cutanées couleur chair 3M™ Steri Strip™ sont fabriquées dans un matériau poreux non-tissé. • Les sutures cutanées élastiques 3M™ Steri Strip™ sont fabriquées dans un matériau élastique poreux non-tissé. Elles sont conformables et étirables pour suivre les mouvements du corps.

Indications : Les sutures cutanées Steri Strip sont destinées à être utilisées pour le traitement des lacérations et des incisions chirurgicales. Elles doivent être utilisées par des professionnels de santé. Les sutures cutanées Steri Strip peuvent également être utilisées en association avec des agrafes et des points de suture, ou après leur retrait pour soutenir la peau.

Contre-indications • Ne pas utiliser là où une bonne adhésion ne peut pas être obtenue en raison de la présence d'exsudat, de sébum, d'humidité ou de poils. • Ne pas utiliser sur des plaies infectées. • Ne pas utiliser sur les plaies à forte tension qu'il n'est pas possible de rapprocher facilement avec les doigts ou un forceps. • Ne pas utiliser comme dispositif de fixation, par exemple pour maintenir des tubes en place.

Avertissements • Pour réduire les risques d'infection, ne pas réutiliser les bandes et jeter les bandes inutilisées

Précautions • Comme avec tous les produits adhésifs appliqués sur la peau, un faible pourcentage des individus peut présenter des irritations cutanées ou des lésions pendant l'utilisation ou lors du retrait. • La tension produite par des oedèmes post-opératoires, des mouvements du corps ou des articulations ou l'application de sutures cutanées sous tension peut provoquer une perte d'adhésion ou des lésions cutanées, y compris une boursouffure. • Une utilisation avec des adhésifs en complément peut provoquer des boursouffures ou des lésions cutanées.

Mode d'emploi

1. Nettoyez et séchez la peau. Éliminez tout excès de poils. Si vous le souhaitez, appliquez une fine couche de composé de teinture de benjoin 3M™ Steri-Strip™ pour améliorer l'adhésion de la suture cutanée.
2. Rapprochez les bords de peau avec les doigts ou un forceps. Appliquez la bande sans tension en appliquant délicatement mais fermement. Lissez du centre vers l'extérieur.
3. Laissez un espace d'environ 1/8" (3 mm) entre les bandes.
4. Il est possible d'appliquer des sutures supplémentaires parallèlement à la plaie à environ 1/2" (12 mm) des extrémités des sutures afin d'améliorer l'adhésion.
5. Pour retirer la suture cutanée, décollez délicatement, doucement et avec un angle faible, en progressant vers le centre de l'incision tout en maintenant la peau.

Stockage / Durée de conservation / Élimination : Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la chaleur ou à l'humidité. Ne pas utiliser si le produit a expiré ou si la date d'expiration est absente ou illisible. Mettre le produit au rebut conformément au protocole de l'établissement.

Mode de conditionnement : Stérile, par rayonnement ou à l'oxyde d'éthylène (OE). Vous trouverez le type de stérilisation indiqué sur l'étiquette. En cas d'incident grave lié au dispositif, veuillez le signaler à 3M et à l'autorité locale compétente (UE) ou à l'autorité locale de réglementation.

Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

Issue Date: 2020-05 34-8726-2891-1