

Brosse chirurgicale stérile et sèche

Instructions d'utilisation AA86_FR

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et l'atmosphère d'ozone.

ETAPE N°1 : 2 MINUTES



Ouvrir l’emballage de la brosse stérile,
Mouiller les mains et les avant bras jusqu’au coude,
Prélever une dose de savon antiseptique,
Frotter, avec un effet de rotation, de la pulpe des doigts jusqu’au coude sans revenir en arrière,

BOITE BROSECO30 V4 05/04/2023

ETAPE N°2 : 2 MINUTES



Mouiller la brosse et l’imbiber de savon antiseptique,
Brosser uniquement les ongles,
Jeter la brosse,
Rincer abondamment.

ETAPE N°3 : 2 MINUTES



Reprendre une dose de savon,
Savonner de la pulpe des doigts jusqu’au coude sans retour en arrière
Insister sur les articulations, les espaces interdigitaux, le pouce, la pulpe des doigts et le bord externe de la main,
Rincer abondamment,
Sécher minutieusement par tamponnement avec l’es-
sue-mains stérile.