

## Bistouri stérile lame N°23

## Instructions d'utilisation AA88\_FR

**MATERIELS UTILISES** : Acier inoxydable, acier carbone, ABS plastique / Polyéthylène basse densité.

**INDICATIONS** : • Incision, dissection • Différentes tailles en fonction de l'épaisseur des tissus et de la zone • Ablation de tissus supplémentaire du champ opératoire

**CONTRE-INDICATIONS** : Pas de contre – indications

**INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS** : • Sélectionner le modèle et la taille de lame appropriés en fonction de la zone, toujours utiliser une taille plus grande pour les tissus épais et une taille plus petite pour les tissus fins. • Après avoir effectué votre choix, nettoyer la zone avec le désinfectant approprié. • Inspecter l'emballage de la lame, bistouri, coupe-fils, autopiqueur, couteau pour greffe de peau, poinçon de biopsie ou curette dermique afin de vérifier son intégrité et sa date de péremption. Ensuite sortir la lame de l'emballage. • La lame doit glisser dans la fente du manche stérile correspondant et vérifier la fixation de la lame dans la fente. • Choisir la zone à inciser. • L'incision doit être effectuée à la longueur désirée, de préférence mesurée et marquée. • Après l'incision, jeter la lame avec précaution dans un container à déchets perforant.

**ATTENTION** : • Lire les instructions avant utilisation. • Le produit peut être utilisé uniquement par un chirurgien, un médecin ou le personnel soignant qualifié. • Vérifier toujours l'intégrité du produit et de la date d'expiration présente sur le blister. • Le produit est stérile, apyrogène et non toxique uniquement si le blister n'est pas ouvert ou endommagé. • Ce produit est à un usage unique, s'il est réutilisé, il peut véhiculer des maladies transmissibles. • Utiliser le produit immédiatement après ouverture du blister. • Stocker le produit dans un endroit frais et sec. • Le fabricant n'est pas responsable de conséquences liées à une mauvaise utilisation.

Infineed est une marque DIDACTIC

V4. 10-2022



DIDACTIC  
216 rue Roland Moreno  
76210 Saint-Jean-de-la-Neuville -FR



Rédaction interne 19/04/2024