

Aiguille de ponction lombaire de Whitacre NRFit™

**MODE D'EMPLOI:****Indications d'utilisation/Utilisation prévue:**

- L'aiguille NRFit™ rachidienne BD® Quincke et l'aiguille NRFit™ rachidienne BD® Whitacre sont conçues pour pénétrer dans la cavité rachidienne ou la percer, permettant ainsi l'injection (notamment pour l'anesthésie)/le prélèvement de liquides aux fins d'une ponction lombaire de diagnostic ou d'une myélographie.
- Ces dispositifs sont destinés aux patients adultes et pédiatriques.

Description du produit

- Les aiguilles NRFit™ rachidiennes BD® Quincke et les aiguilles NRFit™ rachidiennes BD® Whitacre (également appelées aiguilles NRFit™ rachidiennes BD®) se composent d'une aiguille, d'un stylet et d'un protecteur d'aiguille. Elles sont disponibles en des calibres et longueurs d'aiguille différents.
- L'aiguille consiste en une aiguille creuse (canule) fixée à une embase translucide à une extrémité et à un type de pointe spécifique (Quincke ou Whitacre) à l'autre extrémité.
- Le stylet est doté d'une poignée codée par couleur en fonction du calibre.
- L'embase d'aiguille intègre des raccords compatibles avec la norme ISO 80369-6.
- Le protecteur d'aiguille est jaune pour indiquer que le dispositif est conçu pour être raccordé uniquement à des dispositifs conformes à la norme ISO 80369-6 (NRFit™) (des seringues, par exemple).
- Les aiguilles NRFit™ rachidiennes BD® sont stériles, non toxiques et apyrogènes. Ces produits ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, ni de BPA ni de DEHP.

Recommandations générales

- L'utilisation d'une technique aseptique et une préparation adéquate sont essentielles.
- Observer les mesures de précaution universelles avec TOUS les patients.
- **SIGNALER IMMÉDIATEMENT LES PIQÛRES D'AIGUILLE ET SUIVRE LE PROTOCOLE ÉTABLI.**
- Toute ponction percutanée avec une aiguille contaminée peut entraîner une maladie grave telle que l'hépatite, le VIH (SIDA) ou d'autres maladies infectieuses.
- Recouvrir les aiguilles est dangereux.

Mises en garde

- Exclusivement réservé à un usage sur un seul patient. Toute réutilisation peut entraîner une infection ou une autre maladie/lésion.
- Comme pour toute intervention rachidienne, NE PAS ESSAYER DE REDRESSER UNE AIGUILLE PLIÉE afin d'éviter de la casser.
- Si l'aiguille est pliée, en utiliser une neuve.
- S'assurer que la seringue est bien en place dans l'embase de l'aiguille.
- Réservée à des professionnels de santé dûment qualifiés et formés.
- Toujours inspecter l'emballage avant de l'ouvrir.
- Des précautions doivent être prises pour éviter d'endommager l'aiguille. Des repositionnements répétés peuvent augmenter le risque de casser l'aiguille. Surveiller attentivement l'aiguille lors des interventions.
- Ne pas restériliser.
- Éliminer les aiguilles conformément aux directives nationales/de l'établissement.
- **Informations de sécurité relatives aux procédures d'IRM :** ces dispositifs sont incompatibles avec l'IRM. Les maintenir hors de la salle d'examen IRM.

10000334929 Rev.#02 du 14/01/2021