

Seringue 1 ml embout Luer-Lok™



Attention

Le diamètre extérieur de la seringue BD Luer-Lok™ de 1 mL est le même que celui de la seringue BD Luer-Lok™ de 3 mL. Les pousse-seringue à détection de taille automatique confondront cette seringue avec la seringue de 3 mL. Cette erreur causerait une erreur par défaut de 70 % du volume injecté. Afin d'éviter une erreur de volume d'injection, BD® recommande de contacter le fabricant du pousse-seringue, pour savoir si une telle erreur peut se produire, comment l'éviter, et si une révision du logiciel existe pour cette seringue. Certains fabricants ont pris les dispositions nécessaires pour la seringue BD Luer-Lok™ de 1 mL.

Remarque :

Les pousse-seringue sans détection automatique de taille fonctionneront correctement avec la seringue BD Luer-Lok™ de 1 mL. Les dimensions internes critiques de la seringue, qui affectent la précision du volume et le fonctionnement, sont les mêmes que celle de la seringue à embout conique de 1 mL. L'utilisateur entre la taille de la seringue (1 mL) dans le pousse-seringue sans détection de taille automatique ce qui permet à la seringue BD Luer-Lok™ de 1 mL de fonctionner correctement.

Apyrogène —

Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé.



Ne pas utiliser pour les injections orales.

La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices.

Le latex de caoutchouc naturel n'entre pas dans la formulation du matériau.

L'utilisation intra-oculaire n'est pas validée par BD.

ELIMINER DANS UN COLLECTEUR D'AIGUILLE HOMOLOGUE APRES UN SEUL USAGE.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

Pour éviter la transmission du VIH (SIDA), du VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses par piqûres accidentelles, les aiguilles utilisées ne doivent être ni recapuchonnées, ni retirées, à moins qu'il ne soit impossible de faire autrement ou qu'une procédure médicale particulière l'exige. Éliminer toutes les aiguilles et seringues conformément à la réglementation en vigueur dans l'établissement.

DGP67 REV.:3 05/05/21

PAS RECOMMANDE POUR L'USAGE AVEC DES LIPIDES. LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRÉPARÉS DANS CES SERINGUES DOIVENT ÊTRE ADMINISTRÉS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE - DGF303 REV.:05 04/13/21