

GUIDE D'UTILISATION DES BISTOURIS SECURISES

Instructions d'utilisation AB01_FR

Conseils d'utilisation :

- Saisir le bistouri entre le pouce et l'index - Simultanément, appuyer sur le bouton poussoir et faire glisser la lame vers l'extrémité du manche, jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. - Utiliser le bistouri sans appuyer sur le bouton poussoir pendant l'incision. - Pour rétracter la lame provisoirement, faire glisser la commande dans le corps du manche, jusqu'au blocage au premier cran de la glissière Un clic indique que la lame est provisoirement rétractée. - Pour rétracter la lame définitivement, effectuer la même étape en faisant coulisser la commande jusqu'au fond du manche et ce, jusqu'au blocage définitif de la lame. Un clic indique alors que la lame est bloquée et sécurisée. - Eliminer le bistouri rétractable à usage unique dans une boîte de récupération de déchets.

Plan d'accompagnement : Un délégué Swann-Morton est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions techniques, sur rendez-vous présentiel ou distanciel. Un tutoriel en vidéo est disponible sur : <https://www.swann-morton.com>

Fiche technique n°19.3 version 2022 / 2023.



Swann Morton
Owlerton Green
Sheffield, S6 2BJ, England



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem - NL



Date de rédaction interne 30/04/2024