
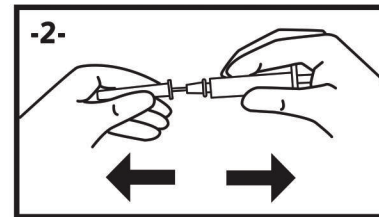


MISE EN GARDE: Lorsque les procédures locales exigent que la seringue pleine soit transportée jusqu'au lieu d'injection, utilisez une technique sûre et passive pour recouvrir l'aiguille avant de la transporter. Une piqûre accidentelle avec une aiguille contaminée peut causer des maladies graves comme le SIDA, l'hépatite et autres maladies infectieuses. Ne pas forcer le capuchon protecteur sur l'aiguille car celle-ci pourrait le percer et provoquer une blessure. Connecter l'aiguille sur la seringue en l'enfonçant fermement, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer le protecteur dans l'axe. La réutilisation peut produire une infection ou autre maladie/préjudice. Ne pas réutiliser. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible.

- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage individuel a été endommagé. Apirogène. Ne pas utiliser par voie orale. Eliminer dans un récipient pour objets souillés tranchants, piquants, coupants approuvé après usage.

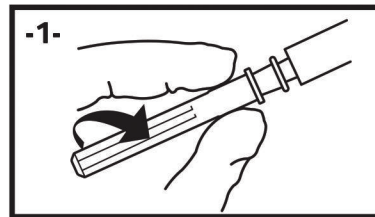

Pousser en tournant

Tirer horizontalement

DGF401 Rev.07 du 31/01/2022

 Becton Dickinson S.A.,
Camino de Valdeoliva, s/n,
28750 San Agustín del Guadalix, Madrid - ES

 **0318**

STERILE EO



Date de rédaction interne 06/05/2024