

Seringue. Si l'utilisation a été validée et revendiquée par le fabricant de la pompe, utiliser une seringue Luer Lock et se référer aux instructions du fabricant de la pompe pour le fonctionnement. Réf. 300613 Non conçue pour être utilisée sur un pousse-seringue. Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage individuel a été endommagé. Apirogène. Ne pas utiliser par voie orale. Eliminer dans un récipient pour objets souillés tranchants, piquants, coupants approuvé après usage.


Utilisation prévue: (Europe/Marquage CE) La seringue BD Plastipak™ sans aiguille est destinée à l'aspiration générale et à l'injection de liquides dans des flacons, des ampoules ou des parties du corps situées sous la surface de la peau. • Précision: ISO 7886-1.

Application: Réservé aux professionnels de santé (par ex., médecins, infirmières, pharmaciens) expérimentés dans l'utilisation de ce dispositif. Les niveaux d'expérience vont de débutant à expert. **AVERTISSEMENTS :** Ne pas utiliser si le produit ou l'emballage présente des particules visibles. • Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé, l'utilisation de produits non stériles peut entraîner une infection. • Une réutilisation peut entraîner une infection ou autre maladie ou lésion. • Si l'utilisation a été validée et revendiquée par le fabricant de la pompe, utiliser une seringue Luer Lock et se référer aux instructions du fabricant de la pompe pour le fonctionnement. •

Complications potentielles liées à la procédure : Douleur, exposition à des liquides physiologiques et/ou des agents pathogènes transmissibles par le sang, risque d'infiltration/d'extravasation, embolie particulaire, embolie gazeuse, infection localisée/systémique, corps flottants, décès. **PRÉCAUTIONS :** Avant toute utilisation, consulter les informations sur l'emballage. • La non-utilisation d'une technique aseptique et le non-respect des directives de l'établissement peuvent entraîner une infection. • Afin d'éviter toute fuite résultant en une dose inexacte ou une exposition à un médicament ou des fluides corporels, utiliser uniquement avec des raccords Luer conformes aux normes ISO et s'assurer que les connexions sont sécurisées. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. • Ces seringues ne sont pas validées par BD pour des procédures ayant des exigences spécifiques telles que, mais sans s'y limiter, l'utilisation intraoculaire et l'irrigation de l'oreille. Suivre le protocole de votre établissement lors du choix des dispositifs pour des applications spécifiques. • Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés dès que possible. • Mettre le dispositif au rebut conformément aux consignes nationales/de l'établissement. **MISE EN GARDE:** Lorsque les procédures locales exigent que la seringue pleine soit transportée jusqu'au lieu d'injection, utilisez une technique sûre et passive pour recouvrir l'aiguille avant de la transporter. Une piqûre accidentelle avec une aiguille contaminée peut causer des maladies graves comme le SIDA, l'hépatite et autres maladies infectieuses. Ne pas forcer le capuchon protecteur sur l'aiguille car celle-ci pourrait le percer et provoquer une blessure. Connecter l'aiguille sur la seringue en l'enfonçant fermement, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer le protecteur dans l'axe. La réutilisation peut produire une infection ou autre maladie/préjudice. Ne pas réutiliser. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible. UE uniquement: les utilisateurs doivent signaler tout incident grave associé à ce dispositif au fabricant et aux autorités nationales compétentes.



Pousser en tournant
DGF40109 Rev.2025-11

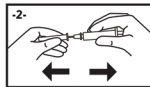

Tirer horizontalement