

DESCRIZIONE

La siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush è un dispositivo medico pronto all'uso, sterilizzato ad irraggiamento. Si tratta di una siringa in polipropilene contenente una soluzione isotonica di cloruro di sodio 0,9%. Il produttore garantisce che il contenuto delle siringhe è sterile, apirogeno e non tossico.

DESTINAZIONE D'USO

La siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush è destinata SOLO AL LAVAGGIO dei dispositivi per accesso vascolare in-situ. Può essere posizionata su campo sterile. La siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush è un dispositivo medico MONOUSO destinato all'utilizzo su SINGOLO PAZIENTE. La siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush deve essere utilizzata in ambito ospedaliero e/o domiciliare da parte di personale medico o infermieristico adeguatamente formato e qualificato alla gestione degli accessi vascolari.

CONTROINDICAZIONI

La siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush NON È DESTINATA per la ricostituzione di prodotti a secco, diluizione di farmaci o in casi dove è indicata una terapia endovenosa con soluzione salina NaCl 0,9%. NON UTILIZZARE la siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush con farmaci incompatibili con cloruro di sodio.

AVVERTENZE

NON USARE il dispositivo se la confezione, o il suo contenuto, risulta danneggiato. Controllare la data di scadenza sull'etichetta del prodotto o sulla confezione. NON USARE dopo la data di scadenza. NON UTILIZZARE il dispositivo se il tappo o l'anello in gomma della siringa presentano danni tali da provocare perdite dalla siringa. NON UTILIZZARE il prodotto se la soluzione appare torbida e/o contiene precipitato e/o qualsiasi tipo di particelle sospese. NON USARE per iniezione endovenosa diretta. NON PERMETTERE che l'aria rimanga intrappolata nel percorso del fluido. La siringa NON DEVE essere RISTERILIZZATA. SOLO PER USO SU SINGOLO PAZIENTE E SINGOLO UTILIZZO. Il riutilizzo del dispositivo può causare infezioni o altre malattie/lesioni. DOPO L'USO RIMUOVERE E SCARTARE LE PORZIONI DI SOLUZIONE NON UTILIZZATE. Una volta aperta la confezione, UTILIZZARE la siringa nell'IMMEDIATO (causa possibili contaminazioni). Il tappo di chiusura della siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush costituisce un pericolo per il soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15°-30°C). Non lasciare la siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush ad una temperatura di congelamento.

SMALTIMENTO

Smaltire la siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush e i relativi tappi secondo le normative vigenti.






ISTRUZIONI PER L'USO : Utilizzare una tecnica asettica per l'intera procedura.

1. Eseguire il corretto lavaggio delle mani. 2. Indossare i DPI (Dispositivi Protezione Individuale). 3. Verificare la data di scadenza. 4. Verificare la corretta integrità della confezione. 5. Aprire la confezione ed estrarre la siringa. 6. Verificare il corretto posizionamento del tappo sulla siringa e la trasparenza della soluzione. (Fig.1A). 7. Premere l'asta con il tappo inserito per sbloccare l'anello in gomma della siringa. (Fig.1B). 8. Svitare il tappo dalla siringa assicurandosi che non si verifichino contaminazioni da contatto sulla connessione Luer della siringa. (Fig.2). 9. Premere l'asta della siringa per espellere l'aria. (Fig.3) Non lasciare che l'aria rimanga intrappolata nel percorso del fluido. 10. Eseguire disinfezione con scrub sul hub del dispositivo di accesso vascolare per almeno 15". 11. Collegare il Luer Lock della siringa al dispositivo di accesso vascolare, prestando attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione mediante contatto del raccordo. (Fig.4). 12. Premere l'asta della siringa per far fuoriuscire il volume necessario di soluzione salina, secondo le procedure e/o protocolli aziendali, e operare la tecnica pulsatile "push and pause" (Fig. 5). 13. Non iniettare una quantità superiore al volume del catetere, assicurandosi che il volume di soluzione che si sta inserendo corrisponda esattamente alla capacità del lume del catetere che si sta trattando. 14. SE SI INCONTRA RESISTENZA DURANTE LA FASE DI COMPRESSIONE DELL'ASTA, NON ESERCITARE ULTERIORE FORZA e indagare circa la presenza di possibili ostruzioni, agendo come da procedure e/o protocolli aziendali. 15. Dopo il lavaggio del lume del catetere, procedere immediatamente alla somministrazione della terapia o ad inserire una soluzione locking antimicrobica per il bloccaggio del catetere. 16. Smaltire le siringhe utilizzate immediatamente dopo l'uso, secondo le procedure e/o protocolli aziendali.

NON INIETTABILE. NON RIUTILIZZARE.

In caso di incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo "siringa preriempita di soluzione salina NaCl 0.9% PentaFlush" segnalare al fabbricante e all'Autorità Competente.

83600201 - Rev. 05 - Emissione: 08/01/2024

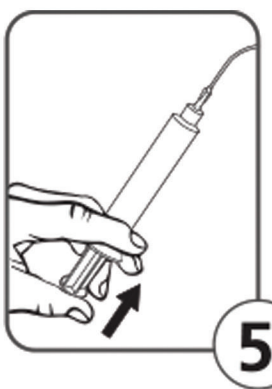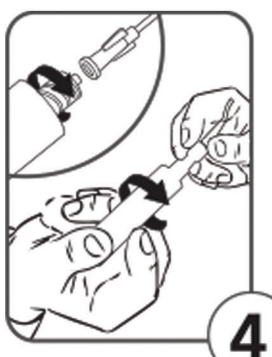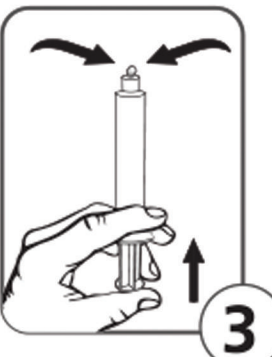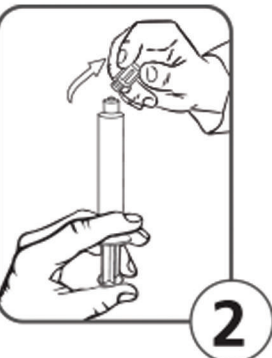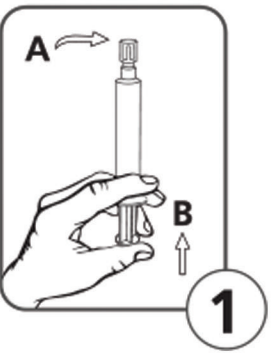

Redatto internamente il 10/07/2024