



Blunt Fill Needle (aiguille filtre émoussée) 18G x 1 1/2" (1.2x40mm)

NE PAS UTILISER POUR INJECTION PERCUTANÉE

L'aiguille de remplissage émoussée BD est utilisée pour l'aspiration et l'injection à usage général de liquides à partir de flacons.

AVERTISSEMENTS :

- Ne pas utiliser si le produit ou l'emballage présente des particules visibles.
- L'utilisation de produits non stériles peut entraîner une infection.
- Toute réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/blessures.
- SIGNALER IMMÉDIATEMENT TOUTE BLESSURE PAR PIQÛRE D'AIGUILLE ET SUIVRE LE PROTOCOLE ÉTABLI.

Toute piqûre percutanée avec une aiguille contaminée peut entraîner de graves maladies telles que l'hépatite, le VIH (SIDA), ou d'autres maladies infectieuses. Il est dangereux de recapuchonner les aiguilles. • Complications potentielles liées à la procédure : Rougeur, irritation, douleur, saignement, anxiété, épisode syncopal, granulome, hématome, paresthésie, exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang, risque d'infiltration/extravasation, embolie graisseuse, infection localisée/systémique, corps flottants.

PRÉCAUTIONS :

- Non destiné aux injections cutanées.
- Avant toute utilisation, consulter les informations sur l'emballage.
- Ouvrir le sachet et traiter le produit dans une zone contrôlée.
- Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement, Avant utilisation, stériliser à l'oxyde d'éthylène uniquement.
- Veuillez contacter BD pour obtenir des informations sur le processus de stérilisation.
- La non-utilisation d'une technique aseptique et le non-respect des directives de l'établissement peuvent entraîner une infection.
- Utiliser une aiguille filtre lors de l'utilisation d'ampoules en verre.
- Ne pas utiliser si l'aiguille est tordue.
- Afin d'éviter toute fuite résultant en une dose inexacte ou une exposition à un médicament ou des fluides corporels, utiliser uniquement avec des raccords Luer conformes aux normes ISO et s'assurer que les connexions sont sécurisées. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Les aiguilles utilisées peuvent être contaminées et doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales/de l'établissement.
- UE uniquement: les utilisateurs doivent signaler tout incident grave en lien avec le dispositif au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

eifu.bd.com Rev. 2022-05

