

Collecteur 3 litres:

AUTOCLAVABLE A 134° PENDANT 18 MN - SELON LA NORMENF X30-511 (couvercle ouvert)


NE PAS REMPLIR AU-DELA DE LA LIMITE DE REMPLISSAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Poser la base du conteneur sur une surface appropriée (par ex. sur une table)
2. Fixer le couvercle en appuyant successivement sur les 4 coins jusqu'à l'obtention du déclic.
3. Veiller à ce que les 4 coins soient emboîtés et le bord du couvercle bien en place (fig.1).

MODE D'EMPLOI

1. Fermeture provisoire : appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer définitivement (fig.2).
2. Réouverture : appuyer sur la languette (fig.3).
3. Fermeture définitive : appuyer fortement sur le volet. Pour s'assurer du verrouillage définitif, veiller à ce que le bord du volet se trouve bien au ras de la bordure du couvercle (fig.4).

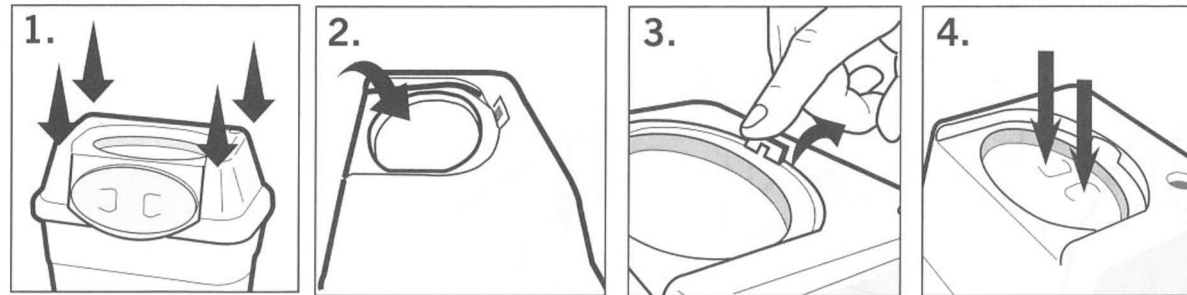

DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR