

INSTRUCTIONS: Après avoir désinfecté le point de ponction et ôté le capuchon protecteur, piquer une veine convenant à la pose du cathéter. Ponctionner la veine. Le reflux sanguin dans la chambre de reflux objective la ponction. Faire progresser le cathéter dans la veine tout en retirant partiellement l'aiguille métallique. Fixer les ailettes (si elles sont prévues) à la peau à l'aide d'une bande adhésive. L'aiguille reste en place, réduisant ainsi au minimum l'écoulement sanguin. Avant de retirer complètement l'aiguille métallique, comprimer la veine en amont du cathéter à l'aide du majeur. Cela permet d'éviter le reflux sanguin. Dans un même temps, maintenir l'embase du cathéter à l'aide de l'index pour éviter que le cathéter ne ressorte de la veine lors du retrait de l'aiguille métallique. Retirer l'aiguille de ponction. Le bouchon protecteur neutralise alors automatiquement le biseau de l'aiguille à son passage dans l'embase du cathéter. Un «click» sonore confirme alors l'activation du dispositif de sécurité, protégeant ainsi l'utilisateur de toute piqûre accidentelle. Jeter ensuite immédiatement l'aiguille dans un container à déchets prévu pour les dispositifs tranchants ou piquants. Les cathéter de sécurité doivent être stockés dans un endroit frais et sec sans exposition à la lumière solaire directe, aux lumières fluorescentes, aux rayons X, à l'ozone, à l'humidité, à des températures excessivement hautes ou basses et des changements brutaux de température. Les cathéters de sécurité sont emballés dans des emballages faciles à ouvrir, qui permettent l'extraction facile et ils sont emballés dans des cartons résistants et empilables, pour faciliter le transport. Les propriétés des cathéters de sécurité, dans les conditions décrites ci-dessus, conservent les caractéristiques jusqu'à 60 mois.



ITALIANA MEDICAZIONE SRL
Contrada Remartello snc
65014 Loreto Aprutino (PE) - IT

C **€0425**



STERILE EO

Date de rédaction interne 19/07/2024