

Description du produit

Les bandes auto-adhésives 3M™ Coban™ sont des bandes élastiques cohésives constituées d'un support non tissé et de fibres élastiques. Grâce à leurs propriétés cohésives, les bandes adhèrent sur elles-mêmes, mais ne collent ni à la peau, ni à d'autres matériaux.

Indications d'utilisation

Les bandes auto-adhésives Coban™ sont indiquées dans les traitements compressifs, la contention, ainsi que le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux. Ce produit a été conçu pour être vendu et utilisé aux seules fins indiquées.

Contre-indications

Aucune connue

Mises en garde

- 1. Les bandes auto-adhésives Coban™ ne glissent pas et ne se détendent pas après application. NE PAS serrer la bande trop fort pour ne pas couper la circulation sanguine et ne pas entraîner de lésions graves. Le risque de mauvaise circulation sanguine est plus élevé chez les enfants.
- 2. Surveiller régulièrement la région où la bande est appliquée (au moins une fois toutes les 24 heures) afin de déceler tout signe de gonflement, de décoloration, de douleur, d'engourdissement, de picotement ou toute autre sensation anormale. Si ces symptômes apparaissent, retirer immédiatement la bande et contacter votre médecin.
- 3. NE PAS utiliser de bandes auto-adhésives Coban™ directement sur une plaie ouverte, au risque d'entraîner une infection.

Attention

Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques

Précautions

- 1. Lorsque la bande est utilisée dans un bandage compressif, il est important de vérifier l'IPS (Indice de Pression Systolique) afin d'éviter tout risque lié à une mauvaise circulation. L'utilisation d'une bande auto-adhésive Coban™ au sein d'un système de compression nécessite une surveillance médicale par un professionnel de santé.
- 2. Ne pas réutiliser une pièce déjà utilisée au risque de réduire la performance du produit.
- 3. Ce produit est à usage unique sur un seul patient afin de réduire le risque de contamination croisée entre différents patients.

Mode d'emploi

- 1. Dérouler environ 12 pouces (30 cm) de bande auto-adhésive Coban™ et la laisser se détendre.
- 2. Sans l'étirer, appliquer la bande en circulaires autour du membre en recouvrant chaque spire des 2/3. Appuyer légèrement sur la zone de chevauchement pour maintenir l'extrémité de la bande. Se référer à la figure 1.
- 3. Appliquer une tension appropriée lorsque vous faites le bandage pour obtenir la compression souhaitée. Dérouler toujours une longueur suffisante de bande auto-adhésive Coban™ avant utilisation pour ne pas appliquer une tension excessive. Se référer à la figure 2.
- 4. Une fois la pose terminée, couper l'excès de bande auto-adhésive Coban™. Maintenir l'extrémité de la bande en exerçant une légère pression.

Utilisation prévue

Ce produit est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé et/ou des particuliers respectants les instructions des professionnels de santé.

Stockage / Durée de conservation / Élimination

Ce produit doit être stocké à température ambiante. Ne pas exposer à la chaleur ou à l'humidité. Pour obtenir de meilleurs résultats, conserver la bande auto-adhésive Coban™ dans son emballage individuel jusqu'à utilisation. Pour connaître la durée de conservation du produit, consulter la date imprimée sur chaque conditionnement. La bande cohésive Coban™ peut être jetée avec les déchets ménagers ou hospitaliers normaux ou conformément aux procédures de l'établissement relatives à la manipulation des déchets.

Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

Veuillez signaler tout incident grave dont la survenue est associée au dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale.

Pour plus d'informations, visitez HCBG regulatory.3M.com

Issue Date: 2022-09 - DV-9063-0043-4/0922 - SAP ID 3100041693/0922

