


SHARPSAFE Collecteur d'aiguilles 3l polypropylène rigide
AUTOCLAVABLE A 134° PENDANT 18 MN - SELON LA NORME NF X30-511
NE PAS REMPLIR AU-DELA DE LA LIMITE DE REMPLISSAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1 - Poser la base du conteneur sur une surface appropriée (par ex. une table)
- 2 - Fixer le couvercle en appuyant successivement sur les 4 coins jusqu'à l'obtention du déclic
- 3 - Veiller à ce que les 4 coins soient emboîtés et le bord du couvercle bien en place (fig.1).

MODE D'EMPLOI

- 1 - Fermeture provisoire : appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à fermer sans le bloquer définitivement (fig.2).
- 2 - Réouverture : appuyer sur la languette (fig.3).
- 3 - Fermeture définitive : appuyer fortement sur le volet. Pour s'assurer du verrouillage définitif, veiller à ce que le bord du volet se trouve bien au ras de la bordure du couvercle (fig.4).

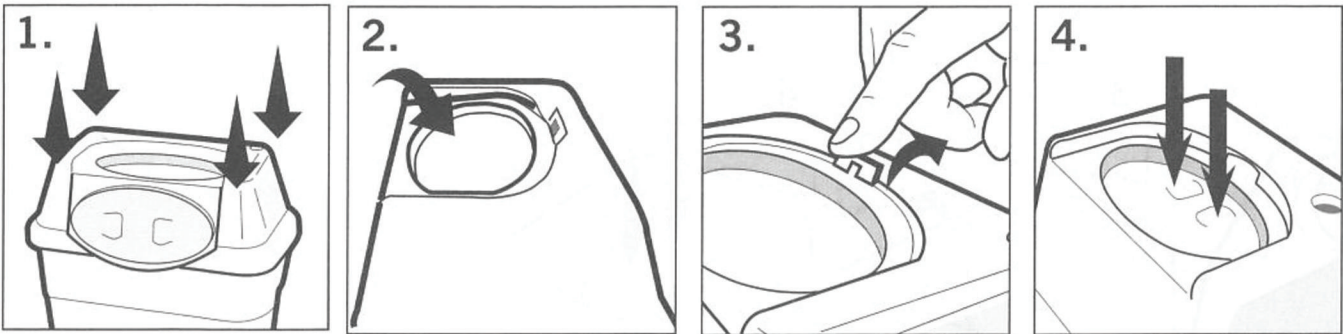

Conforme à la norme NF X30-511 et à son an nexa A certificat de conformité délivré par le L.N.E



Collecteur admis à la marque NF-EMBALLAGES POUR DECHETS D'ACTIVITE DE SOINS PERFORANTS
Fabrication contrôlée et validée par le LNE. N° Identification 01/01
AFAQ AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex



Risque biologique



Conforme à l'A.D.R. (Accord Européen relatif au Transport Onternational des Marchandises Dangereuses par Route)

DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR