

Pansements adhésifs stériles non tissés avec compresse

Information AB21_FR

MODE D'EMPLOI : Se laver les mains soigneusement avant usage et respecter les règles d'asepsie conventionnelles • Ouvrir comme indiqué sur la pochette • Utiliser selon la destination d'usage. **DESTINATION D'USAGE :** Dispositif Médical indiqué pour : Fixation sur zones de mouvement • Fixation de pansements ou compresses sur articulation et relief anatomique • Dispositif seul contre-indiqué pour le traitement des plaies profondes ou escarres, ou chez les patients hémorragiques non médicalisés. **PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Eliminer le dispositif utilisé selon les procédures en vigueur appliquées au risque biologique si nécessaire • Vérifier l'intégrité de la pochette avant usage • Pansement à renouveler régulièrement s'il est saturé d'exsudats ou toutes les 24h au minimum • Ne pas réutiliser car risque infectieux et/ou perte de capacité d'absorption.



ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
No.18 Qixing Road, Majiadian Town
443200 Zhijiang City, Hubei Province - PRC



SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING
CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestraße 80,
D-20537 Hamburg-DE



PBLPNT1020 Ed. 12-2023

PBLPNT1015 Ed. 12-2023

PBH1303 Version du 03/2021

Date de rédaction interne 01/04/2025