

Compresses stériles non tissées

Information AB22_FR

MODE D'EMPLOI : Se laver les mains soigneusement avant usage et respecter les règles d'asepsie conventionnelles • Ouvrir comme indiqué sur la pochette • Utiliser selon la destination d'usage • Maintenir en place par un adhésif ou un bandage si nécessaire.

DESTINATION D'USAGE : Dispositif Médical indiqué pour : Le nettoyage des plaies cicatrisantes • La désinfection des peaux saines avant prélèvement, vaccination ou petite intervention médicale en association avec un antiseptique • La protection d'une plaie ou d'une cicatrice • L'arrêt des hémorragies cutanées bénignes • La cicatrisation de plaies superficielles par absorption d'exsudats.

Dispositif seul contre-indiqué pour le traitement des plaies profondes ou escarres, ou chez les patients hémorragiques non médicalisés.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Eliminer le dispositif utilisé selon les procédures en vigueur appliquées au risque biologique si nécessaire • Vérifier l'intégrité de la pochette avant usage • Pansement à renouveler régulièrement s'il est saturé d'exsudats ou toutes les 24h au minimum • Ne pas réutiliser car risque infectieux et/ou perte de capacité d'absorption.

PBLCNS101050 - Version du 07/2022



ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
No.18 Qixing Road, Majiadian Town
443200 Zhijiang City, Hubei Province - PRC



SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING
CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestraße 80,
D-20537 Hamburg-DE



Date de rédaction interne 02/04/2025